


ORTHOeasy®

*The Complete System
for Cortical Anchorage*

歯科矯正用アンカースクリュー

フォrestaデント オーソージー ピン システム

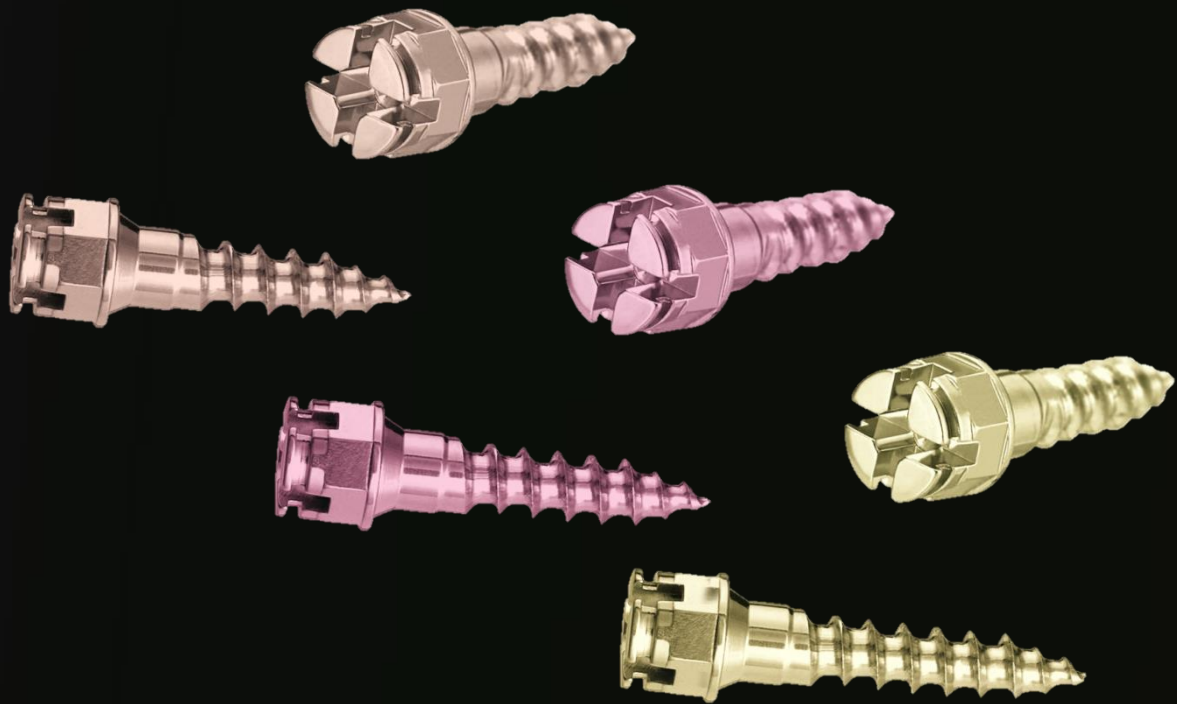


Made in
Germany


OrthoEasy - Cortical Anchorage


歯科矯正用アンカースクリュー
フォレスタデント オーソージー ピン システム


医療機器承認番号:230008ZX00222000
販売名:オーソージー ピン
一般的名称:歯科矯正用アンカースクリュー
高度管理医療機器


機能的なヘッド部と、色分けされた3種類の長さをもつアンカースクリューによって多くの矯正歯科治療に対応します。

 オーソージー ピン システムで使用するアンカースクリューは、シャフト(ネジ)の長さの違いを色で表しています。オーソージー ピンの頭部には矯正器具を取り付けるための十字型スロットが取り付けられています。

 フォレスタデントのオーソージー ピン システム は、アンカースクリュー自体で切り込みをいれ埋入を行うタイプ(セルフドリリング型)の歯科矯正用アンカースクリューです。スクリュー先端は鋭利な切刃構造を持ち、スムーズな埋入と正確な位置決めに貢献します。

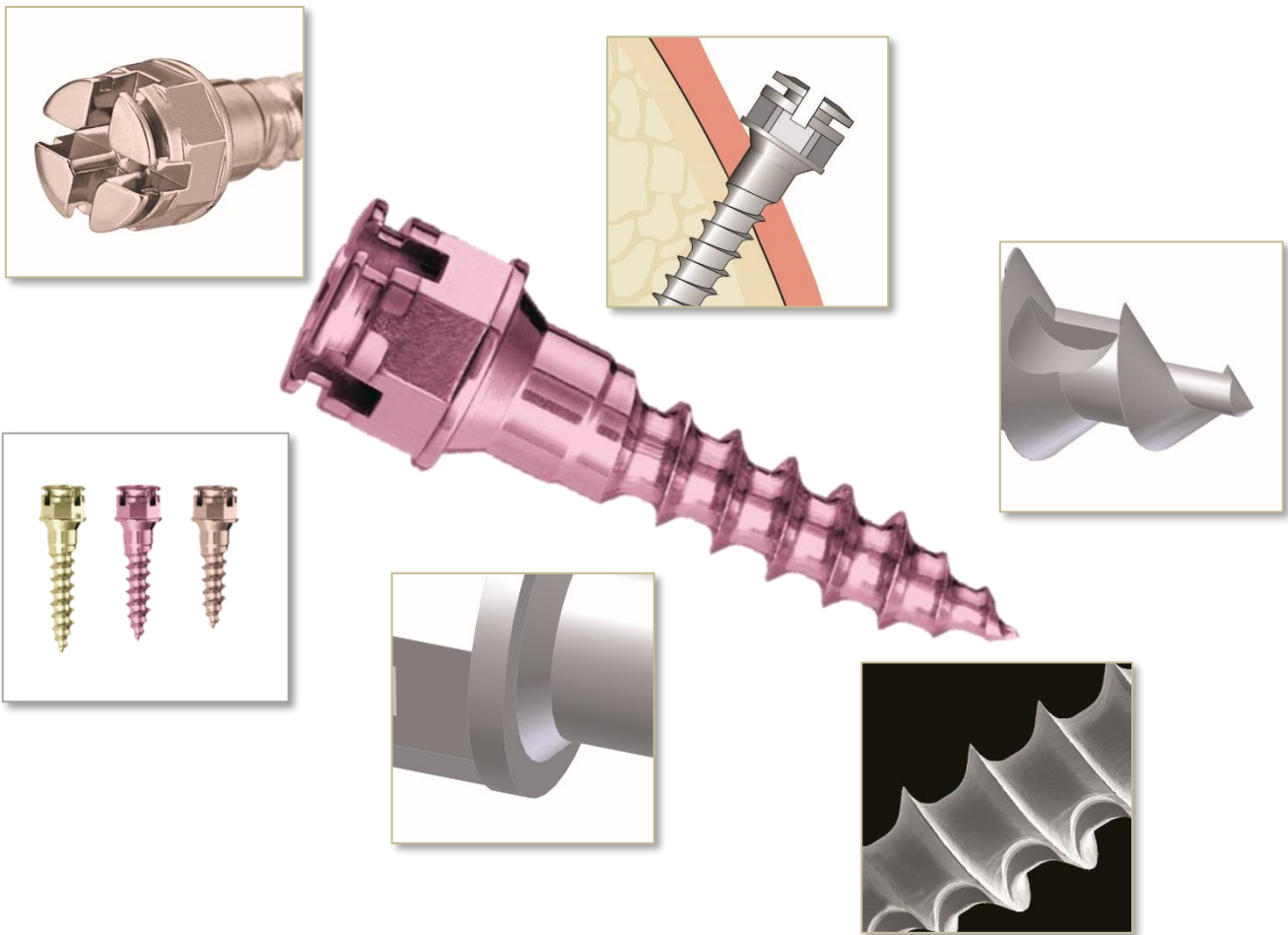

 誘導孔は通常必要ありません。ただし、骨の強さおよび厚さによっては誘導孔が有益となる場合があります。骨が硬い場合、必要であればパイロットドリルで誘導孔を形成してください。ネジ自体で下穴を開け、切り込んでいくためのとてもシャープなネジ山が切られています。

 オーソージー ピンを埋入後、円錐形のネック部が「ストッパー」になり歯肉を密封します。そしてヘッド(円柱部)への移行部分はヘッドと円錐形のネックよりも厚くなっています。これは歯肉がヘッド部に侵入することを防ぎます。

*- 誘導孔(パイロットドリル)は通常必要ありません。ただし、骨の強さおよび厚さによっては誘導孔が有益となる場合があります。また骨が硬い場合、必要であればパイロットドリルで誘導孔を形成します。

OrthoEasy - Cortical Anchorage

歯科矯正用アンカースクリュー
フォレストudent オーソージー ピン システム

ORTHOeasy® Pin System

1 PK (5本入)

注文番号			サイズ	入数
1101A2306		ローズ 6 mm	6 x 1.7 mm Slot .022"	5
1101A2308		ピンク 8 mm	8 x 1.7 mm Slot .022"	5
1101A2310		ゴールド 10 mm	10 x 1.7 mm Slot .022"	5

- オーソージー ピン システムをご使用前には、必ず製品に添付の「添付文書」と「取扱い説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますようお願いいたします。また、「取扱い説明書」は大切に保管してください。
- オーソージー ピン システムは、常にFORESTADENT社純正の専用の器材及び付属品と合わせてご使用ください。これらの製品は互いに適合するよう開発製造されています。他社製品と合わせて使用することは不測のリスクを招きかねないためお勧めできません。
- オーソージー ピン システムは、高度管理医療機器に指定された製品です。初回ご購入時に医療施設名、ご使用者などの登録させていただきますのでご了承ください。

OrthoEasy - Cortical Anchorage

歯科矯正用アンカースクリュー
フォレストudent オーソージー ピン システム

オーソージー ピン システム アクセサリー

注文番号		入数	
1199-0006		1	オーソージーブレード 10 mm ショート <small>届出番号:13B1X10233F00026 販売名:オーソージー ドライバー 一般的名称:手術用ネジ回し 一般医療機器</small>
1199-0015		1	オーソージーブレード 45 mm ロング <small>届出番号:13B1X10233F00026 販売名:オーソージー ドライバー 一般的名称:手術用ネジ回し 一般医療機器</small>
1199-0007		1	オーソージー アングル ハンドピース ブレード 5 mm <small>届出番号:13B1X10233F00026 販売名:オーソージー ドライバー 一般的名称:手術用ネジ回し 一般医療機器</small>
1199-0008		1	オーソージー アングル ハンドピース ブレード 10 mm <small>届出番号:13B1X10233F00026 販売名:オーソージー ドライバー 一般的名称:手術用ネジ回し 一般医療機器</small>
1199-0002		1	オーソージー ハンドル ドライバー <small>届出番号:13B1X10233F00026 販売名:オーソージー ドライバー 一般的名称:手術用ネジ回し 一般医療機器</small>
1199-0000		1	オーソージー ラック <small>*-オーソージーピン、インストルメント等は付属しません。 オーソージーピン専用となります。</small>