

Comfort Line *3D*



Comfort Line 3D buccal tubes



Comfort Line 3D mini buccal tubes



Comfort Line buccal tubes




Tulip buccal tubes

フォrestaデント バッカルチューブ


フォスタデント コンフォートライン 3D バッカルチューブ

コンフォートライン3Dバッカルチューブは、ニッケルフリー*の材質から製造された解剖学的デザインを持つ小さなベースデザインにより優れた接着維持力を持つ、フォスタデント バッカルチューブの新しい製品です。

Ni-Free*

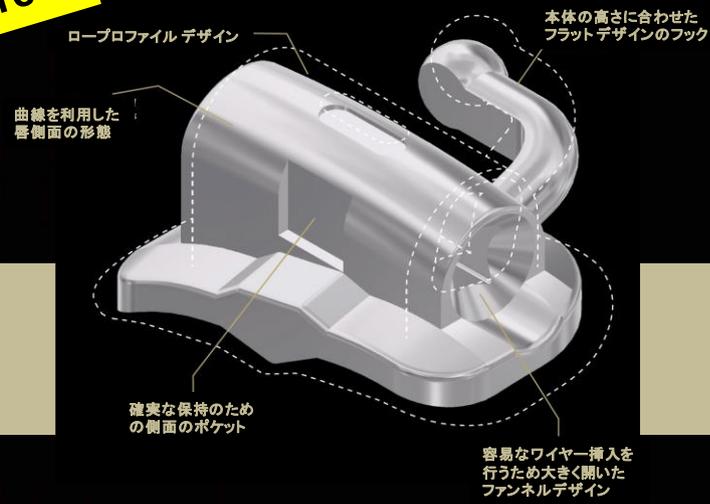

Comfort Line 3D

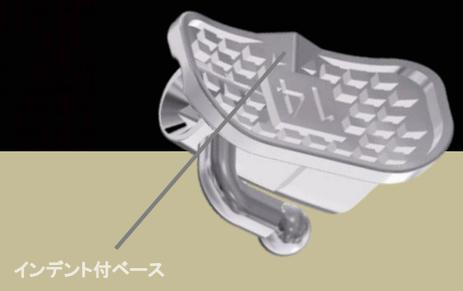

*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

コンフォートライン 3D バッカルチューブのグリップオプション

バッカルチューブのベース部にボンディング剤を塗布し、歯面へ正確にポジショニングするには、バッカルチューブをしっかりと保持する必要があります。ボンディング中に確実にバッカルチューブを保持するために、コンフォートライン 3D バッカルチューブではいくつかのグリップ(保持)オプションを推奨しています。これらのグリップオプションを利用することで、ボンディング剤を塗布したコンフォートライン 3D バッカルチューブを限られたスペース(第一大臼歯、及び第二大臼歯)で適切なポジショニングのための作業を行うことができます。


オプション 1

コンフォートライン 3D バッカルチューブを上方から保持します。ブラケット ロケーティング ツィーザー(注文番号: 501-0867)の先端を上部からチューブ側面にあるポケットを利用して保持します。このポケットはツィーザーの先端部にフィットするように設計されており、確実な保持を可能にします。




オプション 2

コンフォートライン 3D バッカルチューブを横方向から保持します。新しいバッカルチューブ セットアップ ツィーザー(注文番号: 501-0852)の細くフラットな先端がチューブ側面を近心方向から保持します。フック側のツィーザー先端は、フックとベース部の間に差し込みます。

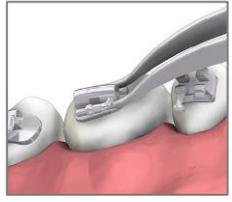

オプション 3

コンフォートライン 3D バッカルチューブを、近心からスロットを利用して保持します。バッカルチューブ セットアップ ツィーザー(注文番号: 501-0852)の先端を、チューブ近心のスロットに挿入して、最適なポジションに導きます。このグリップオプションは、漏斗状にデザインされた近心チューブスロットによって、確実に保持されます。

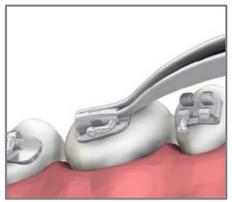

コンフォートライン 3D バッカルチューブのための推奨インストルメント

注文番号			
501-0867		ブラケットロケーティングツィーザー (スモール) オートクレーブ滅菌対応	届出番号: 13B1X10233F00001 販売名: フォスタデント プライヤー 一般的名称: 歯科矯正用プライヤー 一般医療機器
501-0852		バッカルチューブセットアップツィーザー オートクレーブ滅菌対応	届出番号: 13B1X10233F00001 販売名: フォスタデント プライヤー 一般的名称: 歯科矯正用プライヤー 一般医療機器

フォrestaデント コンフォートライン 3D バックルチューブ

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォrestaデントバックルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

Ni-Free*

*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

1 PK (10個入)

上顎	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	インデントなし		インデント付	
						右	左	右	左
Maxillary	76 67	0	-	0	.018	748M8211	748M8311	748K8211	748K8311
					.022	748M8221	748M8321	748K8221	748K8321
	76 67	-10	-	12	.018	774M0804	773M0804	774K0804	773K0804
					.022	774M0802	773M0802	774K0802	773K0802
Trevisi System	76 67	-14	-	12	.018	728M0804	727M0804	728K0804	727K0804
					.022	728M0802	727M0802	728K0802	727K0802
	76 67	-14	-	14	.018	741M0804	740M0804	741K0804	740K0804
					.022	741M0802	740M0802	741K0802	740K0802

Ni-Free*

1 PK (10個入)

下顎	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	インデントなし		インデント付	
						右	左	右	左
Mandibular	76 67	0	-	0	.018	748M8311	748M8211	748K8311	748K8211
					.022	748M8321	748M8221	748K8321	748K8221
Trevisi System	76 67	-10	-	0	.018	728M1804	727M1804	728K1804	727K1804
					.022	728M1802	727M1802	728K1802	727K1802
Trevisi System	76 67	-20	-	0	.018	728M1714	727M1714	728K1714	727K1714
					.022	728M1712	727M1712	728K1712	727K1712
	76 67	-25	-	12	.018	774M1804	773M1804	774K1804	773K1804
					.022	774M1802	773M1802	774K1802	773K1802
	76 67	-30	-	0	.018	748M8315	748M8215	748K8315	748K8215
					.022	748M8325	748M8225	748K8325	748K8225

Ni-Free*

1 PK (10個入)



コンフォートライン 3D
ミニバックルチューブ

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT


	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	右	左
	7 7	-14	-	4	.018	728-0814	727-0814
					.022	728-0812	727-0812
	7 7	-10	-	0	.018	728-1814	727-1814
					.022	728-1812	727-1812

フォスタデント チューリップ バッカルチューブ

チューリップ バッカルチューブはMcLaughlin Bennett 5.0のためにデザインされ、とてもフラットなデザインを持ち、装着時の快適性に大きく貢献します。その名前の通り、チューブの入り口はチューリップ型に開いた形になっており、アーチワイヤーの挿入を迅速かつ容易に行うことが可能です。

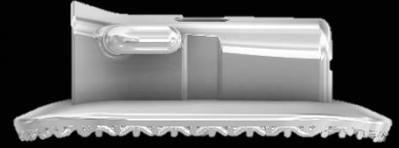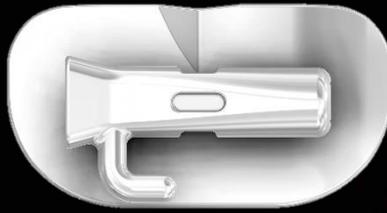

ダイレクトボンディング用
"ビッグフット ベース"

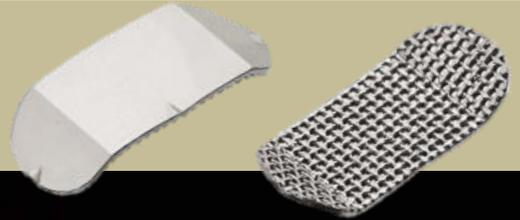

McLaughlin Bennett 5.0 with FORESTADENT

医療機器認証番号: 221AK8ZX00015000
販売名: フォスタデント バッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

上顎 Maxillary	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	ラージベース		"ビッグフット"ベース	
						右	左	右	左
	76 67	-14	-	10	.018	743T0744	742T0744	743B0744	742B0744
					.022	743T0742	742T0742	743B0742	742B0742



1 PK (10個入)



下顎 Mandibular	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	ラージベース		"ビッグフット"ベース	
						右	左	右	左
	6 6	-20	-	0	.018	743T1714	742T1714	743B1714	742B1714
					.022	743T1712	742T1712	743B1712	742B1712
	7 7	-10	-	0	.018	742T0724	743T0724	-	-
					.022	742T0722	743T0722	-	-



1 PK (10個入)



フォスタデント チューリップバッカルチューブ

医療機器認証番号: 221AKB2X00015000
販売名: フォスタデント バッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

Tulip Buccal Tubes

ダイレクトボンディング用 “ビッグフット ベース”

近遠心に付いたノッチを利用して、容易で確実なディボンディングを行うことができます。



パッドサイズ: M/D幅 8.5mm O/G幅 3.5mm



ラージベース



1 PK (10個入)

“ビッグフット”ベース

上顎 Maxillary	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	ラージベース		“ビッグフット”ベース	
						右	左	右	左
76 67	0	-	0	.018	743L0714	742L0714	743B0714	742B0714	
					.022	743L0712	742L0712	743B0712	742B0712
76 67	-10	-	0	.018	743L0724	742L0724	743B0724	742B0724	
					.022	743L0722	742L0722	743B0722	742B0722
76 67	-10	-	6	.018	743L0734	742L0734	743B0734	742B0734	
					.022	743L0732	742L0732	743B0732	742B0732
76 67	-14	-	14	.018	743L0754	742L0754	743B0754	742B0754	
					.022	743L0752	742L0752	743B0752	742B0752



ラージベース



1 PK (10個入)

“ビッグフット”ベース

下顎 Mandibular	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	ラージベース		“ビッグフット”ベース	
						右	左	右	左
76 67	-20	-	0	.018	743L1714	742L1714	743B1714	742B1714	
					.022	743L1712	742L1712	743B1712	742B1712
76 67	-25	-	6	.018	743L1724	742L1724	743B1724	742B1724	
					.022	743L1722	742L1722	743B1722	742B1722
76 67	-30	-	6	.018	743L1734	742L1734	743B1734	742B1734	
					.022	743L1732	742L1732	743B1732	742B1732

フォスタデント コンフォートライン バッカルチューブ

医療機器認証番号: 221AKB2X00015000
販売名: フォスタデント バッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

Comfort Line buccal tubes McLaughlin/Bennett/Trevisi-System*

1 PK (10個入)

tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Base	Base		Base		
						右	左	右	左	
  コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウエルド用	728-0713	727-0713	ダイレクト用 スタンダードベース	728-0714	727-0714
				.022		728-0711	727-0711		728-0712	727-0712
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	-	-	-	-	-
				.022		728B0712	727B0712	-	-	
  コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウエルド用	728-0727	727-0727	ダイレクト用 スタンダードベース	728-0728	727-0728
				.022		728-0725	727-0725		728-0726	727-0726
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	-	-	-	-	-
				.022		728B0726	727B0726	-	-	
  コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウエルド用	728-0803	727-0803	ダイレクト用 スモールベース	728-0804	727-0804
				.022		728-0801	727-0801		728-0802	727-0802
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	-	-	-	-	-
				.022		728B0802	727B0802	728L0802	727L0802	
  コンバーチブル	-20	0	0	.018	ウエルド用	728-1703	727-1703	ダイレクト用 スタンダードベース	728-1704	727-1704
				.022		728-1701	727-1701		728-1702	727-1702
	-20	0	0	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	-	-	-	-	-
				.022		728B1702	727B1702	-	-	
  コンバーチブル	-10	0	0	.018	ウエルド用	728-1803	727-1803	ダイレクト用 スモールベース	728-1804	727-1804
				.022		728-1801	727-1801		728-1802	727-1802
	-10	0	0	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	-	-	-	-	-
				.022		728B1802	727B1802	728L1802	727L1802	

Forestadent Molar Band-PW - フォスタデント バンドプリウエルド

医療機器認証番号: 231AKB2X00024000
販売名: フォスタデント バンドプリウエルド
一般的名称: 歯列矯正用帯理
管理医療機器

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System*

1 PK (5個入)

標準価格 ¥6,900 / PK

バンド	バッカルチューブ スロットサイズ: .022	サイズごと5個入り		スターターキット		
		右	左	100個入 (L50/R50)	200個入 (L100/R100)	400個入 (L200/R200)
 		D728-0711UR05 ~ D728-0711UR36 (バンドサイズは05 - 36までの 32サイズとなります。)	D727-0711UL05 ~ D727-0711UL36 (バンドサイズは05 - 36までの 33サイズとなります。)	D727/728-0711100	D727/728-0711200	D727/728-0711400
 		D728-1701LR05 ~ D728-1701LR36 (バンドサイズは05 - 36までの 33サイズとなります。)	D727-1701LL05 ~ D727-1701LL36 (バンドサイズは05 - 36までの 34サイズとなります。)	D727/728-1701100	D727/728-1701200	D727/728-1701400

- バンドサイズ等は担当営業にお問い合わせください。
- バンドPWスターターキットの納期は受注後1カ月から2カ月となりますので予めご了承ください。

フォレストudent コンフォートライン バッカルチューブ

faceTM *Comfort Line buccal tubes*

医療機器認証番号: 221AKB2X00015000
販売名: フォレストudent バッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

Roth System* & FACE Evolution Prescription

標準価格はすべて1PK(10個入)の価格です。 1 PK (10個入)

tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Base	Base		Base		
						右	左	右	左	
 コンバーチブル	-14	0	14	.018	ウエルド用	741-0703	740-0703	ダイレクト用 スタンダードベース	741-0704	740-0704
				.022		741-0701	740-0701		741-0702	740-0702
	-14	0	14	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	741B0704	740B0704		-	-
				.022		741B0702	740B0702		-	-
 コンバーチブル	-14	0	14	.018	ウエルド用	741-0727	740-0727	ダイレクト用 スタンダードベース	741-0728	740-0728
				.022		741-0725	740-0725		741-0726	740-0726
	-14	0	14	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	741B0728	740B0728		-	-
				.022		741B0726	740B0726		-	-
 コンバーチブル	-30	0	10	.018		-	-	ダイレクト用 スタンダードベース	739-0704	738-0704
				.022		-	-		739-0702	738-0702
	-14	0	14	.018	ウエルド用	741-0803	740-0803	ダイレクト用 スモールベース	741-0804	740-0804
				.022		741-0801	740-0801		741-0802	740-0802
	-14	0	14	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	741B0804	740B0804	ダイレクト用 スタンダードベース	741L0804	740L0804
				.022		741B0802	740B0802		741L0802	740L0802
 face TM	-30	0	6	.018		-	-	ダイレクト用 スモールベース	739-0804	738-0804
				.022		-	-		739-0802	738-0802
 コンバーチブル	-30	0	4	.018	ウエルド用	741-1703	740-1703	ダイレクト用 スタンダードベース	741-1704	740-1704
				.022		741-1701	740-1701		741-1702	740-1702
	-30	0	4	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	741B1704	740B1704		-	-
				.022		741B1702	740B1702		-	-
 face TM	-30	0	4	.018		-	-	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	739B1704	738B1704
				.022		-	-		739B1702	738B1702
 face TM	-30	0	0	.018		-	-	ダイレクト用 スモールベース	739-1804	738-1804
				.022		-	-		739-1802	738-1802
	-30	0	4	.018	ウエルド用	741-1803	740-1803	ダイレクト用 スモールベース	741-1804	740-1804
				.022		741-1801	740-1801		741-1802	740-1802
	-30	0	4	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	741B1804	740B1804	ダイレクト用 スタンダードベース	741L1804	740L1804
				.022		741B1802	740B1802		741L1802	740L1802

Forestadent Buccal Tubes

フォスタデント バッカルチューブ

医療機器認証番号: 221AKB2X00015000
販売名: フォスタデント バッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

Ni-Free*

1 PK (10個入)

標準価格はすべて1PK(10個入)の価格です。

tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Base	注文番号	
						右	左
 コンバーチブル	-14	0	14	.018		741M0704	740M0704
				.022		741M0702	740M0702
 コンバーチブル	-30	0	4	.018		741M1704	740M1704
				.022		741M1702	740M1702

*- Prof. Dr. H.F. Kappert, University of Freiburg, dtd. March 8, 1999. ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Forestadent Quick Molar Bracket

クイック モラー ブラケット(ダイレクト ボンディング ベース)

医療機器認証番号: 221AKB2X00114000
販売名: フォスタデント クイック ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

独自のデザインのベースとフック形態をもったクイック セルフライゲーション モラー ブラケット。
予め口腔外でシンチバックしたワイヤーをセットすることが可能となります。

1 PK (10個入)

	Teeth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Active/Passive	注文番号	
							右	左
	76 67	-14	0	12	.018	インターアクティブタイプ	731-0713	730-0713
					.022		731-0711	730-0711
	76 67	-14	0	12	.018	フルパッシブタイプ	731P0713	730P0713
					.022		731P0711	730P0711
	76 67	-20	0	2	.018	インターアクティブタイプ	731-1713	730-1713
					.022		731-1711	730-1711
	76 67	-20	0	2	.018	フルパッシブタイプ	731P1713	730P1713
					.022		731P1711	730P1711

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォスタデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX.03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは...

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>