

フォrestaデント 2D リンガル ブラケット

2D[®] Lingual Brackets



FORESTADENT[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

**FORESTADENT
2D Lingual System
Philosophy**

フォレストアデント 2D リンガル ブラケットは、シンプルな2D (Bi-Dimensional) リンガル ブラケットです。通常のブラケットにある角型のスロットはありません。2つのセルフライゲーションクリップがワイヤーを保持します。

フォレストアデント 2D リンガル ブラケットは驚くほど薄く、患者さんに快適な装着感を提供します。トルクのない2D リンガル ブラケットのシンプルな治療は、舌側矯正治療を希望する患者さん、そして新たに舌側による矯正治療を行うドクターにとってとても扱いやすい装置となります。ブラケットのセットアップは必要とせず、ダイレクトに装着するリンガル ブラケットです。

ラボワークや装置のコストなどオフィスにとっても相対的な費用対効果を向上させる助けとなります。

厚さわずか1.3mmのリンガル ブラケット

フォレストアデント 2D リンガル ブラケットの本体の厚さはわずか1.3mm*。さらに丸みをもったエッジ デザインとスムーズな表面処理によって、舌側装置でありながら今までにない快適な装着感を実現します。



**FORESTADENT
2D Lingual Bracket
Selfligating System**

使いやすいセルフライゲーション ブラケット

フォレストアデント リンガル ブラケットは、素早く、容易にアーチワイヤーをブラケットに挿入できるバーチカル スロットを持ったセルフライゲーション ブラケットです。アーチワイヤーは、独自のシンプルなお閉機構をもったセルフライゲーション クリップに咬合側(バーチカル インサージョン)から挿入します。




快適な装着感を提供するブラケット

シンプルなおデザインのフォレストアデント リンガル ブラケットは、患者さんの食事や会話への影響を最小限にします。患者さんはブラケットを装着したすぐ後でも、装着前とほとんど同じように会話や食事を楽しむことができます。

**FORESTADENT
2D Lingual Bracket
Extremely Flat Design**

FORESTADENT
2D Lingual System
Characteristic

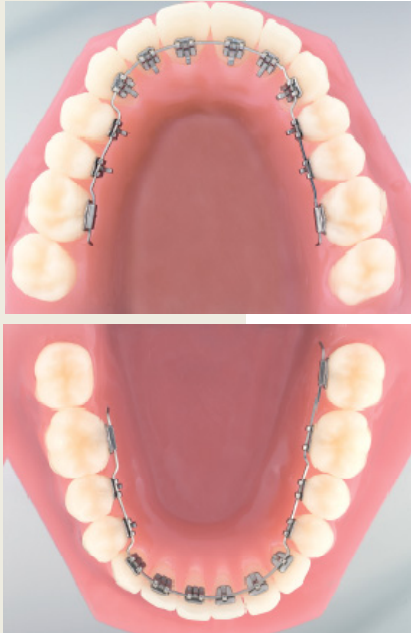

フォレストアデント 2D リンガル ブラケットの主な特徴:

1. シンプルなブラケット デザインなので、全ての歯牙に使用可能です。
2. 咬合側からワイヤーを挿入 (Vertical Insertion) します。
3. 角形のスロットは無く、代わりに2つのクリップでワイヤーを保持します。
4. 摩擦の少ないセルフ ライゲーション機能です。
5. ラウンドワイヤーの最大サイズは .022インチまで保持可能です。
6. ブラケット ハイトはベース部を含め 1.3mm - 1.65mm 、ベースは厚さわずか 0.4mm です。

効果的な治療範囲

フォレストアデント 2D リンガル ブラケットは次のような症例において有効にご利用できます。


リラップス症例, 動的治療終了後の保定用として, マイナーな空隙閉鎖, 軽度な叢生の改善, 軽度なクロスバイト症例

FORESTADENT
2D Lingual System
How to Open and
Close Clip

フォレストアデント 2D リンガル ブラケット

セルフ ライゲーション クリップの開閉

セルフ ライゲーション クリップを開く

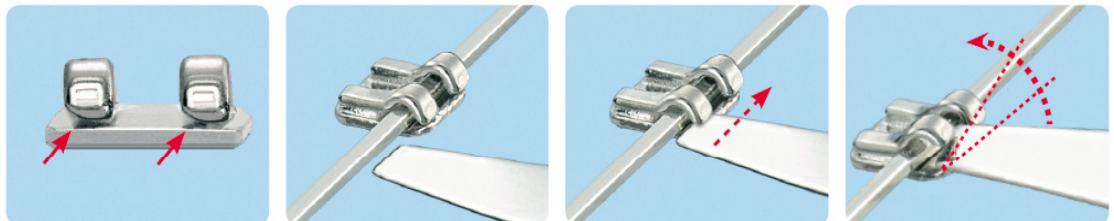

セルフ ライゲーション クリップは専用のインスツルメントを使って開きます。大きく丸みをもったクリップの端 (矢印部) からクリップとベースの間にインスツルメントの先端を差し込み、レバー モーションでクリップを開きます。

セルフ ライゲーション クリップを締める



ブラケットはユーティリティー プライヤーを利用して容易に閉めることができます。ウイングは片方ずつ、確実に閉めていきます。その際は必ず唇側部にはコットンロールをあてるか、プライヤーカバー (501-0935) を利用してください。

2D Lingual Bracket

製品番号

Medium Twin

760-1026


54321 | 12345

54321 | 12345



2D リンガル ブラケット ミディアム ツイン

すべての歯牙部位に使用でき、大臼歯から大臼歯までボンディング可能。通常は2D リンガル システムの基本ブラケットとして 5-5 に使用します。

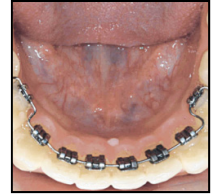

Medium Twin

760-1126

54321 | 12345

54321 | 12345



2D リンガル ブラケット ミディアム ツイン フック付

すべての歯牙部位に使用可能。エラスチック チェーンを併用し、より複雑な症例で効果的に利用できます。



Large Twin

760-1027

654 | 1 | 456

654 | 456



2D リンガル ブラケット エクストラ ツイン

効果的なローテーションコントロールが可能。上顎中切歯や大臼歯に利用できます。



Narrow Single

760-1028

21 | 12



2D リンガル ブラケット ナロー

叢生のある下顎前歯、及び捻転歯に利用します。



Narrow Twin

760-1029

21 | 12




2D リンガル ブラケット ナロー ミニアンツ ツインクリップ

ナロータイプのサイズでありながら、2つのクリップがついたデザインとなっています。近遠心幅の狭いナロータイプなので、下顎前歯への適合性に優れ、インターブラケット間を多くとることができます。さらに2つのクリップによって、優れたローテーションコントロールを可能にします。

Narrow Twin

760-1030

21 | 12

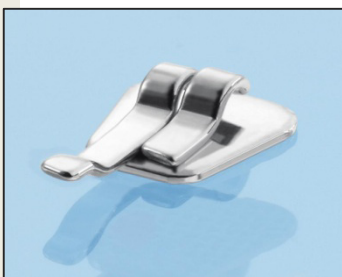

2D リンガル ブラケット ナロー ミニアンツ ツインクリップ フック付

ナロータイプのサイズでありながら、2つのクリップがついたデザイン。2つのクリップによって、優れたローテーションコントロールを可能にします。フック付。

2D Lingual Bracket


製品番号

Medium Twin

763-1126

54321 | 12345

54321 | 12345

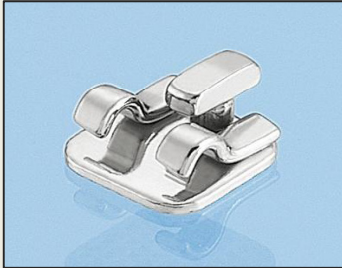

2D リンガル ブラケット ミディアム ツイン T-フック付

エラスチック チェーン等をより容易に利用可能。
ブラケット ハイトは1.65 mm。



Medium Twin

761-1126

54321 | 12345

54321 | 12345



2D リンガル ブラケット ミディアム ツイン 単歯トルク用

.022" x .016" リボンアーチ ワイヤーを使用してトルクを発現させることが可能です。ワイヤーはステンレス スチール ワイヤー、コバルト ニッケル 合金ワイヤー、チタン モリブデン ワイヤーを選択します。

Medium Twin

762-1126

54321 | 12345

54321 | 12345



2D リンガル ブラケット ミディアム ツイン フック付 単歯トルク用

.022" x .016" リボンアーチ ワイヤーを使用してトルクを発現させることが可能です。ワイヤーはステンレス スチール ワイヤー、コバルト ニッケル 合金ワイヤー、チタン モリブデン ワイヤーを選択します。
ジンジバル フック付。

Dr. B. Ludwig and Dr. B. Glasl, Traben-Trarbach, Germany.



2D リンガル 単歯トルク用ブラケットを利用して上顎前歯部にトルクを加えた症例。

Standard Tube

760-1167

67

76

760-2167

76

67



リンガル チューブ フック付

2D リンガル ブラケットの代替として利用します。セルフライゲーション ウィングの開閉の必要がありません。



2D Lingual Bracket

製品番号

Starter Kit
Mix Bracket

707-1503

- 60 T-Hook Bracket
- 40 Medium Bracket
- 1 Consultation Model

Starter Kit
T-Hook Bracket

707-1504

- 100 T-Hook Bracket
- 1 Consultation Model

2D リンガル ブラケット
スターターキット



スターターキット内容（共通）

- 1 リンガル ブラケット オープン ディレクター
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー .010" - Shape 2
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー .010" - Shape 5
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー .012" - Shape 2
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー .012" - Shape 3
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー .012" - Shape 4
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー .012" - Shape 5
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー .016" - Shape 2
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー .016" - Shape 3
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー .016" - Shape 4
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー .016" - Shape 5
- 1 バイオ リンガル アーチワイヤー テンプレート
- 1 製品紹介CD-Rom
- 1 患者さん説明用パンフレット

2D リンガル ブラケットの他、オフセット付のリンガルワイヤー、ディレクター、そして患者さんへのコンサルテーション用のタイポドント模型が付属しています。2D リンガル ブラケット システムがすぐに始められます。ブラケットの種類により2種類のキットからご選択いただけます。

注文番号	キット内容
707-1503	フォレストアデント 2D リンガル ブラケット スターターキット ミックス (100 ブラケット / T-フック 60、フックなし 40) コンサルテーション モデル付
707-1504	フォレストアデント 2D リンガル ブラケット スターターキット T-フック付 (100 T-フック ブラケット) コンサルテーション モデル付

医療機器認証番号: 221AKBZX00048000
販売名: フォレストアデント リンガル ブラケット
医療機器認証番号: 221AKBZX00033000
販売名: フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤ

2D Lingual
Bracket Set



ブラケット ケース付

セット内容	ケース数	1	5	10	20
	ブラケット数	20	100	200	400
x 12 x 8		706-0869	706-0870	706-0871	706-0872
x 20		706-0874	706-0875	706-0876	706-0877

医療機器認証番号: 221AKBZX00048000
販売名: フォレストアデント リンガル ブラケット

950-0213

Model
2D® Lingual Brackets



患者コンサルテーション用模型

2D リンガル ブラケットが付いた、患者さん説明用モデル(上下セット)

2D Lingual Bracket Accessories

製品番号

707-1503

Special explorer with director to open the 2D lingual brackets

501-0223

3 mm

501-0224

4 mm

501-0225

5 mm

Tweezer for positioning 2D Lingual Bracket

501-0863

Lingual calliper rule with graphite marker

435-0005

Template for BioLingual archwires

501-0707

Aderer pliers with narrow standing points


501-0845

Weingart-Ultra light wire plier

501-0935

Plastic cover for Weingart-Ultra light wire plier

フォレストudent 2D リンガル ブラケット アクセサリー

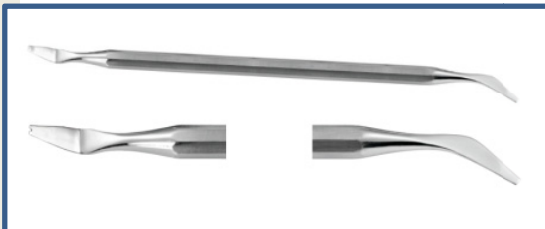

フォレストudent リンガル ブラケット オープン ディレクター



届出番号: 13B2X10094F00002
販売名: フォレストudent ディレクター



2D リンガル ブラケット ツィーザー (3mm, 4mm, 5mm)


歯牙切端から2D リンガル ブラケットのポジショニング位置よって、3サイズから選択します。

届出番号: 13B2X10094F00003
販売名: フォレストudent ポジショニングゲージ

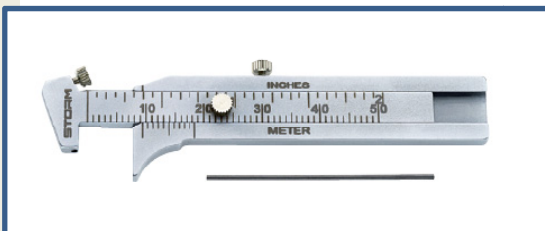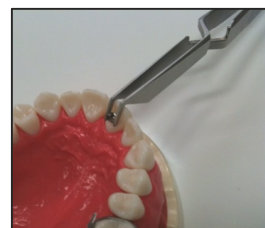

リンガル キャリパー ルーラー
リンガル ブラケット ポジショニング ゲージ

届出番号: 13B2X10094F00003
販売名: フォレストudent ポジショニングゲージ

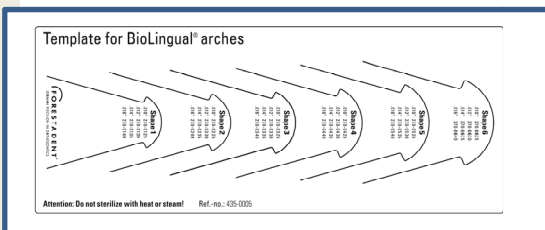

バイオリンガル アーチワイヤー テンプレート

アデラー(スリージョー)プライヤー (ナロータイプ)

ニッケルチタン リンガルワイヤーのオフセットベンディングに最適なナロータイプ。

届出番号: 13B2X10094F00001
販売名: プライヤー



スリム ユーティリティー プライヤー

届出番号: 13B2X10094F00001
販売名: プライヤー



ユーティリティー プライヤー用 プラスチックカバー

唇側歯牙表面の損傷防止と滑り止め用

届出番号: 13B2X10094F00001
販売名: プライヤー



Lingual Wires
BioLingual Wires

バイオリンガル ワイヤー

オフセットバンドの入ったサーモアクティブ リンガル NiTi ラウンド ワイヤー

1 PK (10本入)

サイズ inch	プロファイル	フォース	入数	Shape 1	Shape 2	Shape 3	Shape 4	Shape 5	Shape 6
									
				注文番号	注文番号	注文番号	注文番号	注文番号	注文番号
.010	●	20 g	10	270-0125	270-0225	270-0325	270-0425	270-0525	270-0625
.012	●	30 g	10	270-0130	270-0230	270-0330	270-0430	270-0530	270-0630
.014	●	40 g	10	270-0135	270-0235	270-0335	270-0435	270-0535	270-0635
.016	●	50 g	10	270-0140	270-0240	270-0340	270-0440	270-0540	270-0640

Bio Lingual Wires
Customized-Pack

バイオリンガル ワイヤー カスタマイズド パック

ワイヤー サイズごとに6種類のShapeを組み合わせた10本入りパック



1 PK (10本入)

サイズ inch	プロファイル	フォース	注文番号	Shape 1	Shape 2	Shape 3	Shape 4	Shape 5	Shape 6
.010	●	20 g	270-0025	1	2	2	2	2	1
.012	●	30 g	270-0030	1	2	2	2	2	1
.014	●	40 g	270-0035	1	2	2	2	2	1
.016	●	50 g	270-0040	1	2	2	2	2	1

Lingual Arch Wires

スーパーエラスチック (SE) リンガル アーチ ワイヤー

1 PK (10本入)

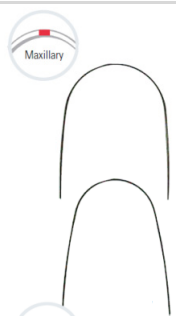注文番号 上顎	注文番号 下顎	プロファイル	サイズ mm	サイズ inch	入数	アーチフォーム
272-0825	272-0925	●	0.25	.010	10	
272-0830	272-0930		0.30	.012	10	
272-0835	272-0935		0.35	.014	10	
272-0840	272-0940		0.40	.016	10	
272-1440	272-1540	■	0.41 x 0.41	.016 x .016	10	
272-2040	272-2140	■	0.56 x 0.41	.022 x .016	10	