

Expansion Screws


Memory-Expansion screws

フォスタデント メモリー エクспанション スクリュー


メモリー エクспанション スクリューは、本体に組み込まれた超弾性スプリングにより持続的で安定した矯正力を発揮します。

フォスタデントのメモリー エクспанション スクリューは、超弾性スプリングをスクリュー本体に組み入れています。そのため常に持続的で安定した矯正力を生み出し、临床上多くの利点と効果が期待できます。これはフォスタデントだけがご提供できるテクノロジーです。

使用方法は今までの拡大スクリューと同じです。スクリューキーを差込、回転させて拡大を行います。超弾性スプリングが生み出す生体に適した持続的な力は患者さんにやさしい装着感を提供します。使用用途に合わせて7種類の製品をご用意しています。

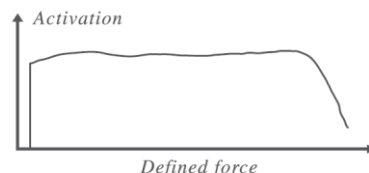



メモリーエクспанション スクリュー

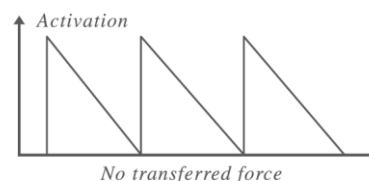

通常のエクспанション スクリュー




Exclusive from
FORESTADENT

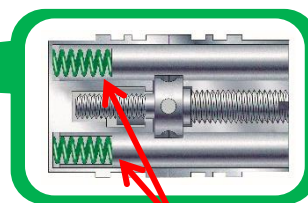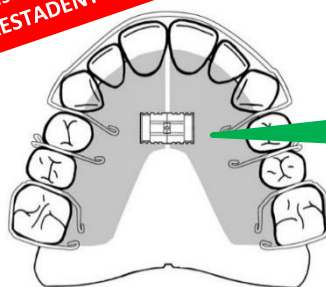

超弾性コイルスプリングが組み込まれた本体内部

メモリースクリューの機能を動画で確認できます。

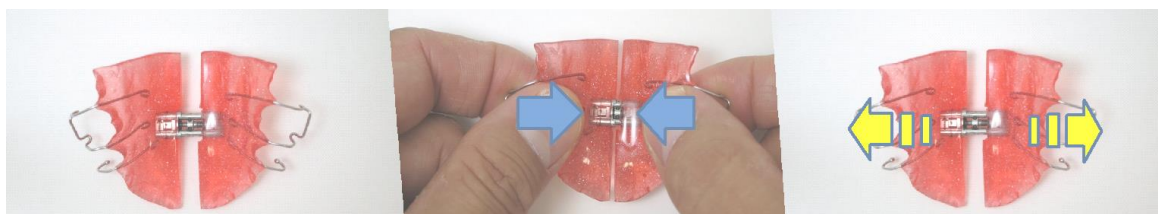


通常通りキーを使って装置を拡大します。


装置(スプリング)を縮めて口腔内にセットします。

スプリングの反発力を活かした持続的な矯正力を発揮します。


フォスタデント メモリー エクспанションスクリューは使用用途に合わせて7種類の製品をご用意しています。

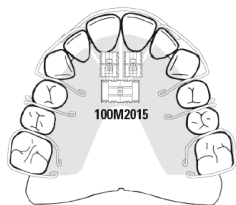


側方拡大用、単歯移動用

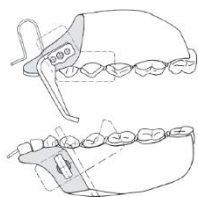


バイトジャンピング アプライアンス (BJA) 上下用

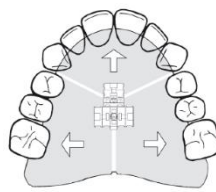

3-ディメンション エクспанション スクリュー

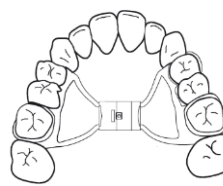

急速拡大用タイプN

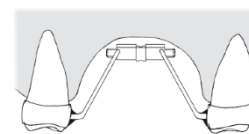

急速拡大用タイプS




Memory-Expansion screws



フォレストアデント メモリー エクスパンション スクリュー

メモリー ユニバーサル エクスパンション スクリュー

最も一般的な床タイプの側方拡大用エクスペンション スクリュー。上下顎兼用でご使用いただけます。



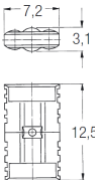


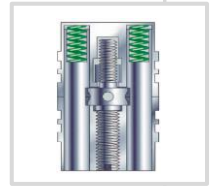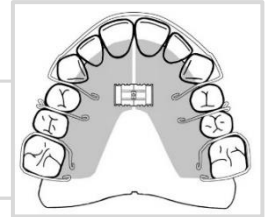
医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストアデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器




注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	
100M2015		5mm  0.7		10	メモリー ユニバーサル エクスペンション スクリュー 上下顎用 Force: 約500g
100M2015J				1	



メモリー エクスパンダー タイプ “N” & タイプ “S”

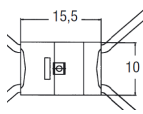
スケルトンタイプのエクスペンション スクリュー。本体内部に組み込まれたNiTi製コイルスプリングによって過大過ぎない一定の荷重を与えることが可能です。

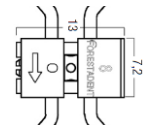注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	
167M1529		10mm  0.8		5	メモリー エクスパンダー タイプ “N” Force: 約 8N (800g)
167M1529J				1	
A167M1326	 with Protection	8mm  0.7		5	メモリー アナトミカル エクSPANダー タイプ “S” Force: 約 5N (500g)
A167M1326J				1	

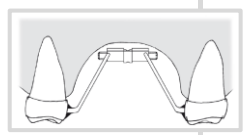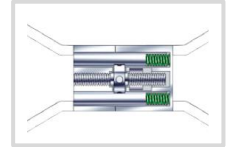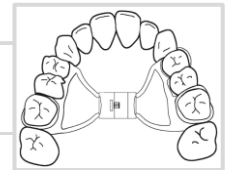

パラタル スプリット スクリュー キー

スケルトンタイプのスクリューに使用。1個入り。

注文番号		入数	
100-0009		1	パラタル スプリット スクリュー キー

Expansion Screws


Memory-Expansion screws

フォレストアデント メモリー エクスパンション スクリュー

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストアデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器


メモリー 3-ディメンション エクスパンション スクリュー

床タイプのエクスパンション スクリュー。上顎側方拡大と上顎前歯部の前方位方向への拡大が行えます。

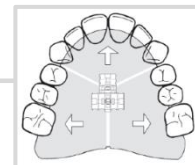

Exclusive from
FORESTADENT

注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	
165M1413				5	メモリー 3-ディメンション エクスパンション スクリュー Bertoni Force:約500g
165M1413J				1	

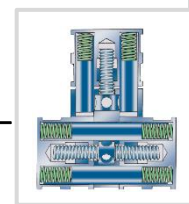


メモリー バイト ジャンピング アプライアンス (BJA) 上顎用 & 下顎用

バイト ジャンピング アプライアンスに用いるエクスパンション スクリュー。上顎は側方拡大スクリューにガイド・バーがレーザー溶接され、下顎用のエクスパンション スクリューには前歯部に斜面板が付属します。

Exclusive from
FORESTADENT

注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	
169M1343			-	5	メモリー バイト ジャンピング アプライアンス (BJA) 上顎用 本体に組み込まれた超弾性スプリングによって、従来品と比較してより効果的な側方拡大が見込めます。 Force:約500g
169M1343J				1	
100M2016			-	5	メモリー バイト ジャンピング アプライアンス (BJA) 下顎用 傾斜角調整のためのホルダーマウントが付属します。 Force:約500g
100M2016J				1	

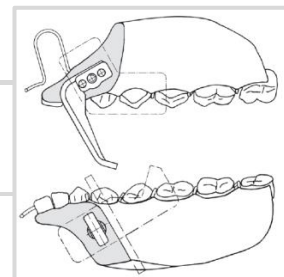

with Protection