



FACE EVOLUTION SYSTEM

製品カタログ



Quicklear® III -Brackets

クイックリアー III
セルフライゲーション セラミック ブラケット



Quick® -Brackets

クイック
セルフライゲーション メタル ブラケット



Mini Sprint® II-Brackets

ミニ スプリント II ブラケット

Quicklear® III -Brackets



クイックリアー III セルフライゲーション セラミックブラケット

クイックリアー III は審美性と安定したメカニクスを可能にする美しく強いセルフライゲーションブラケットです。



第3世代のクイックリアー セラミック ブラケットは、よりロープロファイル デザインとなり、また高性能なクリップ機構を用いて、安定した開閉が可能となっています。歯冠色のセラミックとマット仕上げのクリップによりブラケットは目立ちにくくなっており、上顎5-5、および下顎3-3に使用可能です。

クイックリアー ブラケットのワイヤー スロットのエッジ部に丸みをつけ、スロット内部には4つのコンタクト ポイントをデザインしました。これによってワイヤーとスロットの接触部が最小限となり、最小のフリクションで矯正力をコントロールします。専用のインスツルメントを利用し、前面(唇側)、又は歯肉側から2通りの方法でクリップを開くことが出来ます。

ブラケット本体内側にオフセットをつけて彫りこまれたクイックリアー セラミック ブラケットのベースは、その独自のデザインによって安定したリテンション(接着強度)を実現すると共に、専用のブラケット撤去用インスツルメントを利用してセラミック ブラケットを破壊することなく容易に撤去ができます。 また近遠心に傾斜をつけたブラケット ベースのデザインは安全で安定したブラケット撤去を可能にします。

イージー ディボンディング



組み合わせ自在 — アクティブでもパッシブでも

フォレストアデントのクイックリアー / クイック ブラケットは、同一設計のためすべてを組み合わせ使用することが可能です。たとえば、アクティブ ブラケットは、前歯部におけるトルクを的確にコントロールし、また側方部位ではより摩擦の少ないフルパッシブ ブラケットを使用して急速牽引、遠心移動および空隙閉鎖を効果的に行うことが可能となります。さらに必要に応じて大臼歯にクイックモラー ブラケット(フルパッシブ タイプ、又はインターアクティブ タイプを選択可能)を使用することでよりその効果は広がります。さらにクイックリアー セラミック ブラケットを前歯部に使用することでより審美的な治療が可能となります。

FACE Evolution System – クイックリアー III セルフライゲーション セラミックブラケット – アクティブ システム



1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	1.0	-	C739-0103	C738-0103	C739-0101	C738-0101
2 側切歯	+8	+9	1.3	-	C739-0203	C738-0203	C739-0201	C738-0201
3 犬歯 フック付	+3	+8	0.9	-	C739-0313	C738-0313	C739-0311	C738-0311
4 小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	C739-0513	C738-0513	C739-0511	C738-0511
5 小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	C739-0513	C738-0513	C739-0511	C738-0511
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	10	739-0704	738-0704	739-0702	738-0702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	6	739-0804	738-0804	739-0802	738-0802

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	-1	0	1.4	-	C738-1303	C738-1303	C738-1301	C738-1301
2 側切歯	-1	0	1.4	-	C738-1303	C738-1303	C738-1301	C738-1301
3 犬歯 フック付	-6	+2	1.2	-	C739-1413	C738-1413	C739-1411	C738-1411
4 小臼歯 フック付	-17	0	1.2	-	C739-1513	C738-1513	C739-1511	C738-1511
5 小臼歯 フック付	-22	0	1.2	-	C739-1613	C738-1613	C739-1611	C738-1611
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739B1704	738B1704	739B1702	738B1702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739-1804	738-1804	739-1802	738-1802

下 顎 Option					Slot .018		Slot .022	
1+2 中切歯	-6	0	1.4	-	C738-1203	C738-1203	C738-1201	C738-1201

Bracket Set		Slot .018		Slot .022	
		注文番号		注文番号	
		1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
上下顎 5-5	犬歯・小臼歯フック付	C706C1206	C706C1207	C706C1215	C706C1216

医療機器認証番号: 221AKBZX00115000
販売名: フォレストudent クイックリアー ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

医療機器認証番号: 221AKBZX00120000
販売名: フォレストudent クイック/クイックリアー ブラケット スターター キット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器


医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストudent パッケージチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

FACE Evolution System – クイックリアー III セルフライゲーション セラミックブラケット* – ハイブリットシステム



P - フルパッシブブラケット

* - 臼歯部はメタルブラケット使用

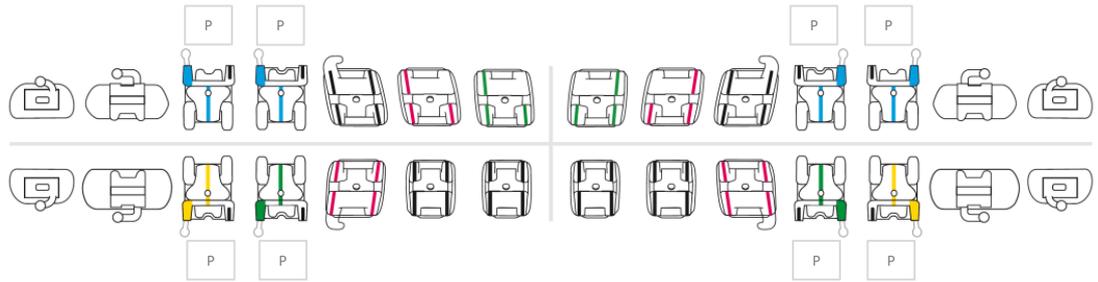

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	1.0	-	C739-0103	C738-0103	C739-0101	C738-0101
2 側切歯	+8	+9	1.3	-	C739-0203	C738-0203	C739-0201	C738-0201
3 犬歯 フック付	+3	+8	0.8	-	C739-0313	C738-0313	C739-0311	C738-0311
4 小臼歯 小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	739H0503	738H0503	739H0501	738H0501
	-7	0	0.9	-	739H0513	738H0513	739H0511	738H0511
5 小臼歯 小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	739H0503	738H0503	739H0501	738H0501
	-7	0	0.9	-	739H0513	738H0513	739H0511	738H0511
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	10	739-0704	738-0704	739-0702	738-0702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	6	739-0804	738-0804	739-0802	738-0802

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	-1	0	1.4	-	C738-1303	C738-1303	C738-1301	C738-1301
2 側切歯	-1	0	1.4	-	C738-1303	C738-1303	C738-1301	C738-1301
3 犬歯 フック付	-6	+2	1.2	-	C739-1413	C738-1413	C739-1411	C738-1411
4 小臼歯 小臼歯 フック付	-17	0	1.2	-	739H1503	738H1503	739H1501	738H1501
	-17	0	1.2	-	739H1513	738H1513	739H1511	738H1511
5 小臼歯 小臼歯 フック付	-22	0	1.2	-	739H1603	738H1603	739H1601	738H1601
	-22	0	1.2	-	739H1613	738H1613	739H1611	738H1611
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739B1704	738B1704	739B1702	738B1702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739-1804	738-1804	739-1802	738-1802

下 顎 Option					Slot .018		Slot .022	
1+2 中切歯	-6	0	1.4	-	C738-1203	C738-1203	C738-1201	C738-1201



Bracket Set		Slot .018		Slot .022	
		注文番号		注文番号	
		1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
上下顎 5-5	犬歯フック付	C706H1203	C706H1204	C706H1212	C706H1213
上下顎 5-5	犬歯・小臼歯フック付	C706H1206	C706H1207	C706H1215	C706H1216

医療機器認証番号: 221AKBZX00115000
販売名: フォレストアデント クイックリアー ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

医療機器認証番号: 221AKBZX00120000
販売名: フォレストアデント クイック/クイックリアー ブラケット スターター キット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストアデント パッシブブラケット
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

医療機器認証番号: 221AKBZX00114000
販売名: フォレストアデント クイックブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Quick® -Brackets

クイックセルフライゲーションメタルブラケットシステム


クイックブラケットはインターアクティブタイプのクイックLPブラケット、またはフルパッシブタイプのクイックパッシブブラケットの2種類から選択が可能です。




販売開始より第4世代となったクイックブラケットは、以前のブラケットと比較してロープロファイルデザイン(クイックLPブラケット)となり、特に上下顎の前歯部のブラケット(3-3)はより快適性を増しました。



スロットはインターアクティブタイプで、ワイヤーサイズが .018" x .018" 又は .016" x .022" まではパッシブな状態となり、ワイヤーサイズが .018" x .025" (.018 スロット)、又は .022" x .025" (.022 スロット)になると完全なアクティブな状態となり、より効果的なトルクコントロールが可能となります。

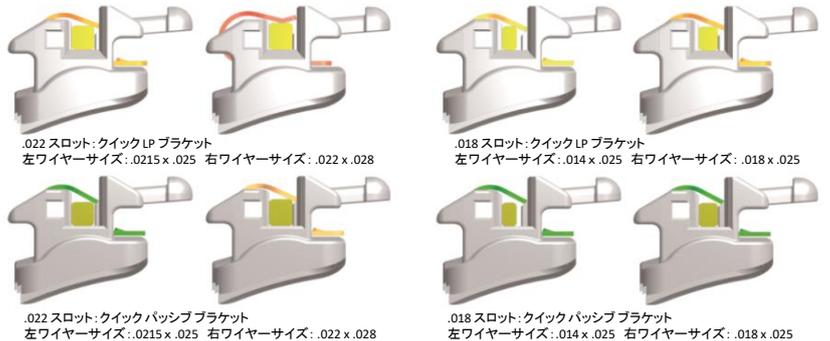


メタルのセルフライゲーションブラケットのクイックは、インターアクティブタイプのクイックLPブラケット、およびフルパッシブタイプのクイックパッシブブラケットから選択できます。この2タイプのブラケットは同一設計でスロットの深さだけが違うため、両者を組み合わせて使用することができます。

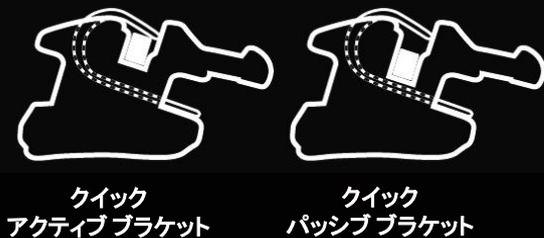

クイックリアー セラミックブラケット同様に2通りの方法でクリップを開きます。共通のインスツルメントを使用して唇側面、または歯肉側から容易にクリップを開くことができます。柔軟性と強度を併せ持つクリップは、不要な力による変形を押えます。

FACE Evolution System – クイックセルフライゲーション メタル ブラケット – アクティブ システム

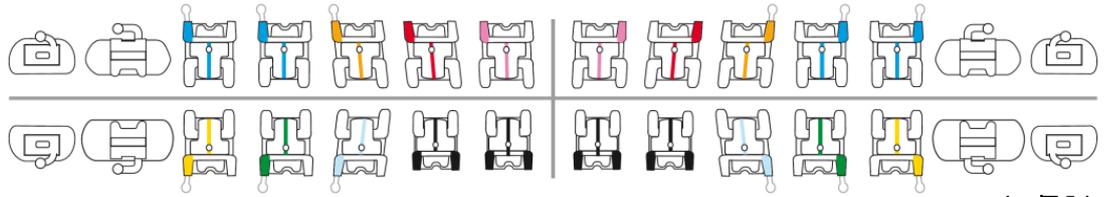

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	0.8	-	739-0103	738-0103	739-0101	738-0101
2 側切歯	+8	+9	1.3	-	739-0203	738-0203	739-0201	738-0201
3 犬歯	+3	+8	0.8	-	739-0303	738-0303	739-0301	738-0301
	犬歯 フック付	+3	+8	0.8	-	739-0313	738-0313	739-0311
4 小臼歯	-7	0	0.9	-	739-0503	738-0503	739-0501	738-0501
	小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	739-0513	738-0513	739-0511
5 小臼歯	-7	0	0.9	-	739-0503	738-0503	739-0501	738-0501
	小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	739-0513	738-0513	739-0511
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	10	739-0704	738-0704	739-0702	738-0702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	6	739-0804	738-0804	739-0802	738-0802

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	-1	0	1.4	-	738-1303	738-1303	738-1301	738-1301
2 側切歯	-1	0	1.4	-	738-1303	738-1303	738-1301	738-1301
3 犬歯	-6	+2	1.2	-	739-1403	738-1403	739-1401	738-1401
	犬歯 フック付	-6	+2	1.2	-	739-1413	738-1413	739-1411
4 小臼歯	-17	0	1.2	-	739-1503	738-1503	739-1501	738-1501
	小臼歯 フック付	-17	0	1.2	-	739-1513	738-1513	739-1511
5 小臼歯	-22	0	1.2	-	739-1603	738-1603	739-1601	738-1601
	小臼歯 フック付	-22	0	1.2	-	739-1613	738-1613	739-1611
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739B1704	738B1704	739B1702	738B1702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739-1804	738-1804	739-1802	738-1802

下 顎 Option					Slot .018		Slot .022	
1+2 中切歯	-6*	0	1.4	-	738-1203	738-1203	738-1201	738-1201

Bracket Set	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	5症例セット	10症例セット	1症例セット	5症例セット	10症例セット
上下顎 5-5						
フックなし	706-1200	706-1201	706-1202	706-1209	706-1210	706-1211
犬歯フック付	706-1203	706-1204	706-1205	706-1212	706-1213	706-1214
犬歯・小臼歯フック付	706-1206	706-1207	706-1208	706-1215	706-1216	706-1217


医療機器認証番号: 221AKBZX00114000
販売名: フォレストダントクイックブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストダント バッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

FACE Evolution System – クイックセルフライゲーションメタルブラケット – ハイブリットシステム



P - フルパッシュブラケット

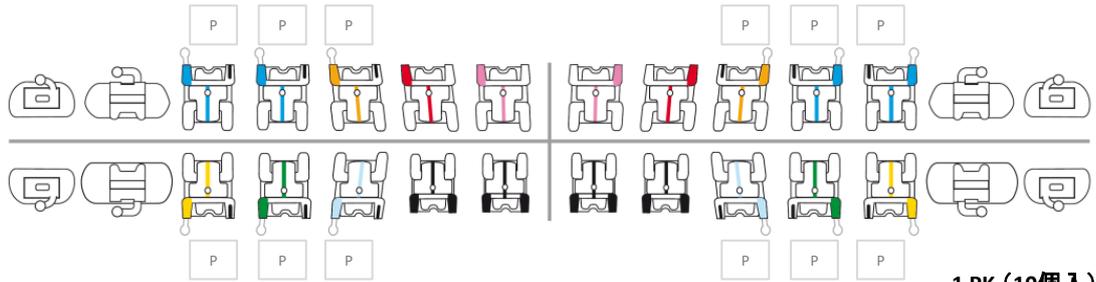

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	0.8	-	739-0103	738-0103	739-0101	738-0101
2 側切歯	+8	+9	1.3	-	739-0203	738-0203	739-0201	738-0201
3 犬歯	-2	+11	0.8	-	739H0303	738H0303	739H0301	738H0301
	犬歯 フック付	-2	+11	0.8	-	739H0313	738H0313	739H0311
4 小臼歯	-7	0	0.9	-	739H0503	738H0503	739H0501	738H0501
	小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	739H0513	738H0513	739H0511
5 小臼歯	-7	0	0.9	-	739H0503	738H0503	739H0501	738H0501
	小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	739H0513	738H0513	739H0511
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	10	739-0704	738-0704	739-0702	738-0702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	6	739-0804	738-0804	739-0802	738-0802

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	-1	0	1.4	-	738-1303	738-1303	738-1301	738-1301
2 側切歯	-1	0	1.4	-	738-1303	738-1303	738-1301	738-1301
3 犬歯	-11	+7	1.2	-	739H1403	738H1403	739H1401	738H1401
	犬歯 フック付	-11	+7	1.2	-	739H1413	738H1413	739H1411
4 小臼歯	-17	0	1.2	-	739H1503	738H1503	739H1501	738H1501
	小臼歯 フック付	-17	0	1.2	-	739H1513	738H1513	739H1511
5 小臼歯	-22	0	1.2	-	739H1603	738H1603	739H1601	738H1601
	小臼歯 フック付	-22	0	1.2	-	739H1613	738H1613	739H1611
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739B1704	738B1704	739B1702	738B1702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739-1804	738-1804	739-1802	738-1802

下 顎 Option					Slot .018		Slot .022	
1+2 中切歯	-6*	0	1.4	-	738-1203	738-1203	738-1201	738-1201

Bracket Set	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	5症例セット	10症例セット	1症例セット	5症例セット	10症例セット
上下顎 5-5						
フックなし	706H1200	706H1201	706H1202	706H1209	706H1210	706H1211
犬歯フック付	706H1203	706H1204	706H1205	706H1212	706H1213	706H1214
犬歯・小臼歯フック付	706H1206	706H1207	706H1208	706H1215	706H1216	706H1217

医療機器認証番号: 221AKBZX00114000
販売名: フォレスタudentクイックブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレスタudent バッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

Mini Sprint® II-Brackets

Ni-Free*



ミニスプリントII メタルブラケット

ミニスプリントからミニスプリントII ブラケットへ
FORESTADENTでは従来のミニスプリントの基本デザインはそのままに、臨床における使いやすさと口腔内での快適性を改善しました。

主な改善点は:


1. ブラケットベースのアライメントの変更
2. タイウイング下のスペースを確保したまま、ブラケットのロープロファイル化を実現
3. 装着時の快適性の向上のため、フックのデザイン変更と、ブラケットをより丸みのあるデザインに変更
4. 確実な接着強度のために、コンタベース デザインの改善

丸みを帯びたブラケットと滑らかな表面により、装着感が向上。

正確なポジショニングのため途切れないセンターライン。

患者さんの快適さとより良い審美性のためのローフラットなプロファイル。


解剖学的にデザインされた新しいフックベースにより接着強度が向上。

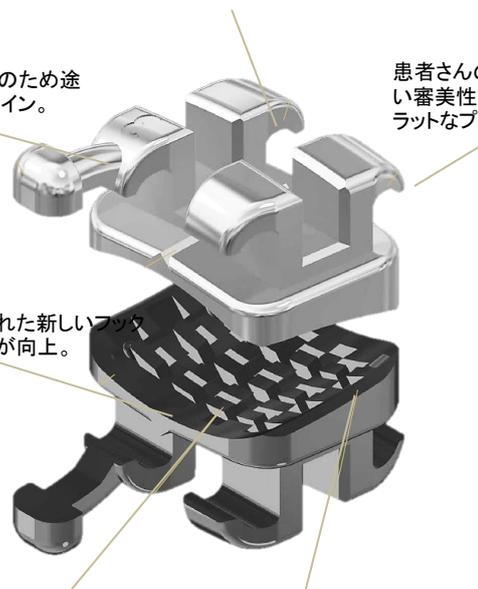

よフラットなデザインにより干渉が抑えられたフック形状。

ブラケット撤去が容易な近心および遠位の面取り部。

FACE Evolution System – クイックセルフライゲーションメタルブラケット – ハイブリットシステム

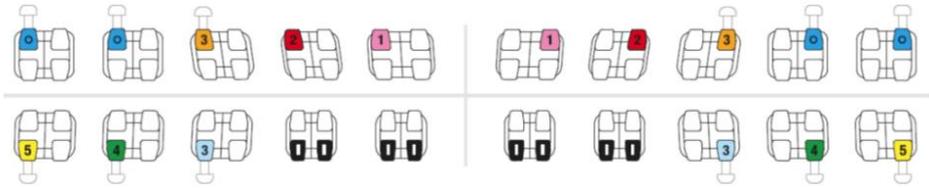

* - Prof. Dr. H.F. Kappert, University of Freiburg, dtd. March 8, 1999. ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000
販売名: フォレスタデント スプリントブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	0.8	-	794-0103	793-0103	794-0101	793-0101
2 側切歯	+8	+9	1.3	-	794-0203	793-0203	794-0201	793-0201
3 犬歯	+3	+8	0.8	-	794-0313	793-0313	794-0311	793-0311
	犬歯 フック付	+3	+8	0.8	-	794-0303	793-0303	794-0301
4+5 小臼歯	0	0	0.9	-	794-0533	793-0533	794-0531	793-0531
	小臼歯 フック付	0	0	0.9	-	794-0523	793-0523	794-0521
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	10	739-0704	738-0704	739-0702	738-0702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	6	739-0804	738-0804	739-0802	738-0802

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-1	0	1.4	-	793-1303		793-1301	
3 犬歯	-6	+2	1.2	-	794-1413	793-1413	794-1411	793-1411
	犬歯 フック付	-6	+2	1.2	-	794-1403	793-1403	794-1401
4 小臼歯	-12	0	0.7	-	794-1533	793-1533	794-1531	793-1531
	小臼歯 フック付	-12	0	0.7	-	794-1523	793-1523	794-1521
5 小臼歯	-17	0	0.7	-	794-1633	793-1633	794-1631	793-1631
	小臼歯 フック付	-17	0	0.7	-	794-1623	793-1623	794-1621
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739B1704	738B1704	739B1702	738B1702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739-1804	738-1804	739-1802	738-1802

下 顎 Option					Slot .018		Slot .022	
1+2 下顎前歯	-6	0	1.4	-	793-1203		793-1201	

ミニ スプリント II ブラケット セット 5-5

FACE Evolution System II

	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706-1218	706-1219	706-1220	706-1227	706-1228	706-1229
犬歯フック付	706-1221	706-1222	706-1223	706-1230	706-1231	706-1232
犬歯・小臼歯フック付	706-1224	706-1225	706-1226	706-1233	706-1234	706-1235

FACE Evolution & Trevisi System – Ni-Ti & SS ArchWires

ニッケルチタン & ステンレススチール アーチワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZX00033000
販売名: フォレストudent ニッケルチタン ワイヤー
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ
管理医療機器

医療機器認証番号: 230AKBZX00022000
販売名: フォレストudent SS アーチワイヤー
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ
管理医療機器



1 PK (10本入)



				Straight-Arch-Form		Euro-Smile-Form													
				注文番号															
				上顎	下顎	上顎	下顎												
アーチワイヤー	プロフィール	フォース	サイズ inch																
												BioStarter® Wire バイオスターター ワイヤー	●	20 g	.010	203-0825	203-0925	203-1825	203-1925
														30 g	.012	203-0830	203-0930	203-1830	203-1930
														40 g	.014	203-0835	203-0935	203-1835	203-1935
70 g	.018	203-0845	203-0945	203-1845	203-1945														
BioTorque® Wire バイオトルク ワイヤー	■	170 g	.019 x .025	203-2048	203-2148	203-4048	203-4148												
ステンレススチール アーチワイヤー	■	-	.019 x .025	202-3748	202-3848	201-3748	201-3848												
		-	.021 x .025	202-3754	202-3854	201-3754	201-3854												

アーチワイヤー	プロフィール	サイズ	サイズ inch	注文番号
ステンレス スチール ポステッド ワイヤー 1 PK (10本入)	■	26 mm	.019 x .025	255-2648
		28 mm		255-2848
		30 mm		255-3048
		32 mm		255-3248
		34 mm		255-3448
		36 mm		255-3648
		38 mm		255-3848
		40 mm		255-4048



ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレスタデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは・・・

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>
