

New Range Of Aligner Pliers

アライナープライヤーに新しいシリーズが加わりました

アライナーをより使いやすく、そして効果的に使用するためのプライヤー



アライナー プライヤー シリーズ に新たに加わった4本の
プライヤーです。アライナーを利用した矯正治療をより柔
軟に、効果的に行うために有効なインスツルメントです。



アライナー プライヤー (トラックAフォイル専用)



アライナー プライヤー タイプA、B は先端部をガストーチ等で少し熱することにより、トラックAで作成したアライナーなどの装置に対して、加工や修正作業を容易に行うことができます。



アライナー プライヤー タイプB
タイプAでボタンを作成したあと、タイプBを利用してボタンの根元を絞り、アンダーカットを作ります。



アライナー プライヤー タイプA
アライナー装置の歯肉部を絞り、フォイルを押し出してボタンを作成します。



アライナー プライヤー タイプD
若干の歯軸のコントロールを行うため、アライナー装置内側に深さ 1mmのディンプルを形成します。

注文番号

AA-01-139



アライナー プライヤー タイプ A
シリンダー フォーミング プライヤー

ボタンを作成するプライヤーです。ガストーチ等で熱する(約120°C~125°C)と スムーズな作業を行うことができます。



AA-02-133



アライナー プライヤー タイプ B
アンダーカット フォーミング プライヤー

タイプA プライヤーで作成したボタンにアンダーカットを施し、エラスチック等の保持を確実にします。




AA-03-139



アライナー プライヤー タイプ C
リテンション フォーミング プライヤー

リテンションを高めるため、先端の小さなティップを利用してリテンション グリップを作成します。

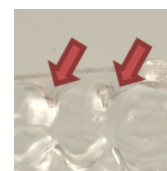


AA-04-150



アライナー プライヤー タイプ D
マルチアイデンテーション フォーミング プライヤー

歯牙のローテーションコントロール、歯軸、及び歯根の是正を効果的に行います。

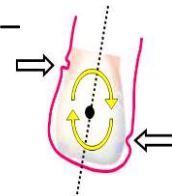

SC-190-73A



1/パック/5本入り

アライナー リフター
(5本入り)

アライナー リフターは、マウスピース型矯正装置やクリアリテーナーなどの装置を傷つけることなく外すことができます。



アライナー プライヤー (トラックAフォイル専用)



NEW

アライナー プライヤー シリーズ に新たに加わった4本のプライヤーです。細かなローテーションやトルクのコントロール、エラスチックゴムを利用するためのスリットを作成、ボンダブル ボタンやブラケットのためにアライナーの歯肉側にスペースのための切り抜きを付与するプライヤー等、アライナーを利用した矯正治療をより柔軟に、効果的に行うために有効なインストルメントです。



注文番号

CA-05-125



アライナー プライヤー タイプ E
パーティカルノッチ フォーミング プライヤー

アライナーに縦軸のノッチを付与し、ローテーションの是正を行います。



CA-06-125



アライナー プライヤー タイプ F
水平ノッチ フォーミング プライヤー

アライナーに横軸のノッチを付与し、トルクの是正を行います。



CA-07-125




アライナー プライヤー タイプ G
ティアードロップ フォーミング プライヤー

アライナーの歯肉縁にエラスチックゴムの保持のためのノッチを作成し、他のアタッチメントと連携に利用します。



CA-08-125

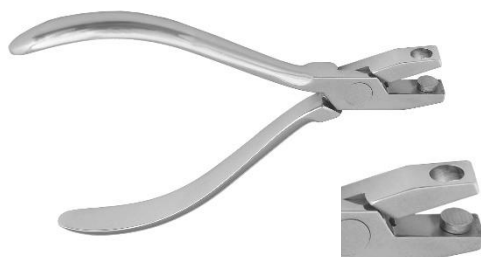

アライナー プライヤー タイプ H
ホール フォーミング プライヤー

アライナーの歯肉縁に半月形の切り抜きを作成し、ボタンなどのスペースを確保します。



届出番号: 13B1X10233F00017
販売名: アライナー プライヤー

<お問い合わせ・販売元> **フォスタデント・ジャパン株式会社**

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご相談は…… TEL. 03-6277-6980 <http://www.forestadent.co.jp>