

Comfort Line *3D*



Comfort Line 3D buccal tubes



Comfort Line 3D mini buccal tubes




Tulip buccal tubes

フォrestaデント バッカルチューブ


フォスタデント コンフォートライン 3D バッカルチューブ

コンフォートライン3Dバッカルチューブは、ニッケルフリー*の材質から製造された解剖学的デザインを持つ小さなベースデザインにより優れた接着維持力を持つ、フォスタデント バッカルチューブの新しい製品です。

Ni-Free*

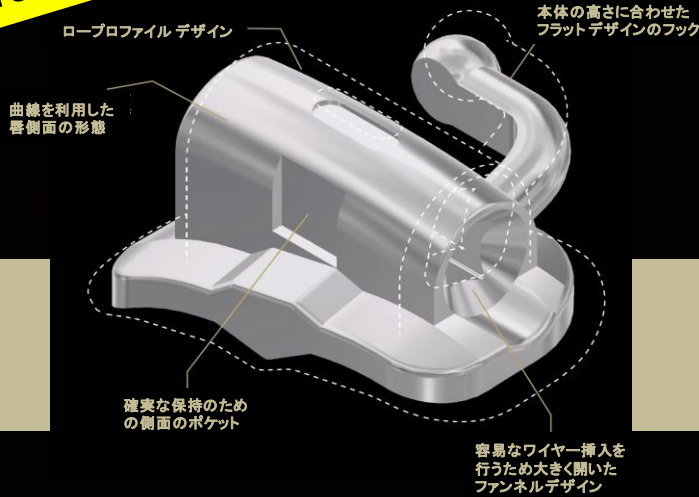

Comfort Line 3D

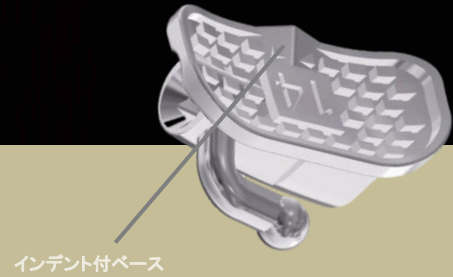


*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

コンフォートライン 3D バッカルチューブのグリップオプション

バッカルチューブのベース部にボンディング剤を塗布し、歯面へ正確にポジショニングするには、バッカルチューブをしっかりと保持する必要があります。ボンディング中に確実にバッカルチューブを保持するために、コンフォートライン 3D バッカルチューブではいくつかのグリップ(保持)オプションを推奨しています。これらのグリップオプションを利用することで、ボンディング剤を塗布したコンフォートライン 3D バッカルチューブを限られたスペース(第一大臼歯、及び第二大臼歯)で適切なポジショニングのための作業を行うことができます。

オプション 1

コンフォートライン 3D バッカルチューブを上方から保持します。ブラケット ロケーティング ツィーザー(注文番号: 501-0867)の先端を上部からチューブ側面にあるポケットを利用して保持します。このポケットはツィーザーの先端部にフィットするように設計されており、確実な保持を可能にします。

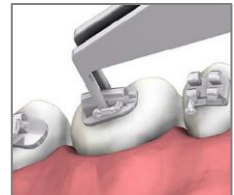


オプション 2

コンフォートライン 3D バッカルチューブを横方向から保持します。新しいバッカルチューブ セットアップ ツィーザー(注文番号: 501-0852)の細くフラットな先端がチューブ側面を近心方向から保持します。フック側のツィーザー先端は、フックとベース部の間に差し込みます。



オプション 3

コンフォートライン 3D バッカルチューブを、近心からスロットを利用して保持します。バッカルチューブ セットアップ ツィーザー(注文番号: 501-0852)の先端を、チューブ近心のスロットに挿入して、最適なポジションに導きます。このグリップオプションは、漏斗状にデザインされた近心チューブスロットによって、確実に保持されます。

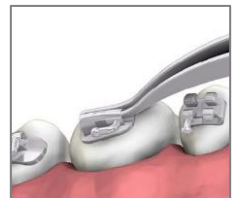

コンフォートライン 3D バッカルチューブのための推奨インストルメント

注文番号		
501-0867		ブラケットロケーティングツィーザー (スモール) オートクレーブ滅菌対応 標準価格 ¥7,800 届出番号: 1381X10233F00001 販売名: フォスタデントプレイヤー
501-0852		バッカルチューブセットアップツィーザー オートクレーブ滅菌対応 標準価格 ¥7,800 届出番号: 1381X10233F00001 販売名: フォスタデントプレイヤー

フォレストアデント コンフォートライン 3D バックルチューブ

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストアデント バックルチューブ

Ni-Free*

コンフォートライン 3D
ミニバックルチューブ

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT

	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	1 PK (10個入)	
						右	左
	7 7	-14	-	4	.018	728-0814	727-0814
					.022	728-0812	727-0812
	7 7	-10	-	0	.018	728-1814	727-1814
					.022	728-1812	727-1812

*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Ni-Free*



上顎 Maxillary	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	1 PK (10個入) 標準価格 ¥11,800 / PK		1 PK (10個入) 標準価格 ¥11,800 / PK	
						インデントなし		インデント付	
						右	左	右	左
	76 67	0	-	0	.018	748M8211	748M8311	748K8211	748K8311
					.022	748M8221	748M8321	748K8221	748K8321
	76 67	-10	-	12	.018	774M0804	773M0804	774K0804	773K0804
					.022	774M0802	773M0802	774K0802	773K0802
Trevisi System	76 67	-14	-	12	.018	728M0804	727M0804	728K0804	727K0804
					.022	728M0802	727M0802	728K0802	727K0802
	76 67	-14	-	14	.018	741M0804	740M0804	741K0804	740K0804
					.022	741M0802	740M0802	741K0802	740K0802

Ni-Free*


下顎 Mandibular	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	1 PK (10個入) 標準価格 ¥11,800 / PK		1 PK (10個入) 標準価格 ¥11,800 / PK	
						インデントなし		インデント付	
						右	左	右	左
	76 67	0	-	0	.018	748M8311	748M8211	748K8311	748K8211
					.022	748M8321	748M8221	748K8321	748K8221
Trevisi System	76 67	-10	-	0	.018	728M1804	727M1804	728K1804	727K1804
					.022	728M1802	727M1802	728K1802	727K1802
Trevisi System	76 67	-20	-	0	.018	728M1714	727M1714	728K1714	727K1714
					.022	728M1712	727M1712	728K1712	727K1712
	76 67	-25	-	12	.018	774M1804	773M1804	774K1804	773K1804
					.022	774M1802	773M1802	774K1802	773K1802
	76 67	-30	-	0	.018	748M8315	748M8215	748K8315	748K8215
					.022	748M8325	748M8225	748K8325	748K8225

フォrestaデント チューリップ バッカルチューブ

チューリップ バッカルチューブはMcLaughlin Bennett 5.0のためにデザインされ、とてもフラットなデザインを持ち、装着時の快適性に大きく貢献します。その名前の通り、チューブの入り口はチューリップ型に開いた形になっており、アーチワイヤーの挿入を迅速かつ容易に行うことが可能です。

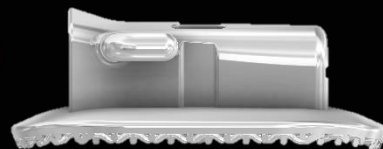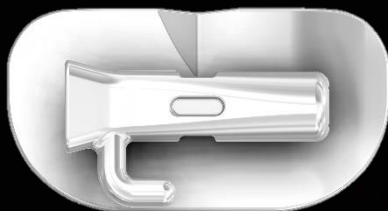

ダイレクトボンディング用
"ビッグフット ベース"

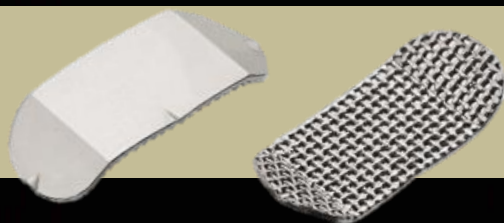

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォrestaデント バッカルチューブ

McLaughlin Bennett 5.0 with FORESTADENT

上顎 Maxillary	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	ラージベース 標準価格 ¥10,800 / PK		"ビッグフット"ベース 標準価格 ¥11,800 / PK	
						右	左	右	左
	76 67	-14	-	10	.018	743T0744	742T0744	743B0744	742B0744
					.022	743T0742	742T0742	743B0742	742B0742

下顎 Mandibular	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	ラージベース 標準価格 ¥10,800 / PK		"ビッグフット"ベース 標準価格 ¥11,800 / PK	
						右	左	右	左
	6 6	-20	-	0	.018	743T1714	742T1714	743B1714	742B1714
					.022	743T1712	742T1712	743B1712	742B1712
	7 7	-10	-	0	.018	742T0724	743T0724	-	-
					.022	742T0722	743T0722	-	-

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォrestaデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX.03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは...

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>