

NEW

とっても小さくて薄いメタルブラケットです。

フォrestaデント マイクロ スプリント ブラケット

Micro Sprint® Brackets




Ni-Free*



* ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

フォスタデント マイクロ スプリント ブラケット

Micro Sprint® Brackets

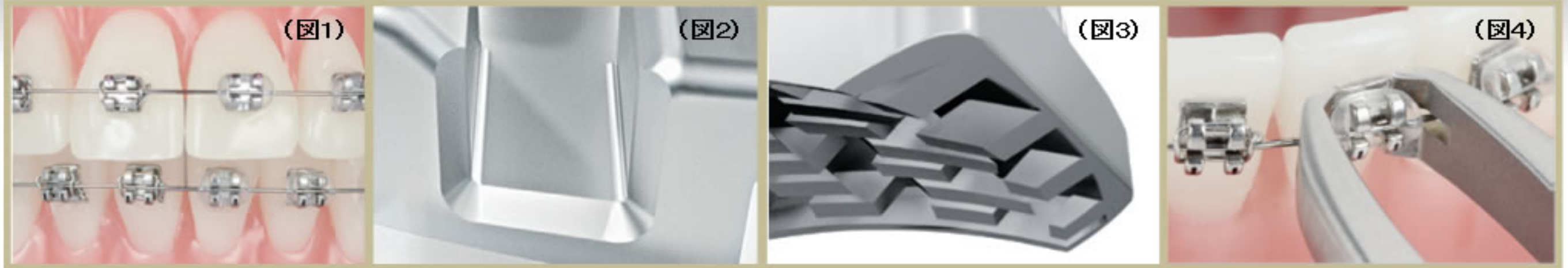

フォスタデント スプリント ブラケットに新しくとても小さなブラケットがラインアップされました。マイクロ スプリント ブラケット (図1)は、従来のミニ スプリント ブラケットと比較し、さらにサイズを縮小し、市場でも際立って小さく薄いメタルブラケットとして誕生しました。しかしながら、FORESTADENT社のエンジニアは単に小さなブラケットを開発することだけが目的ではありませんでした。新しいフォスタデント マイクロ スプリント ブラケットは、一体成型のブラケットで、ブラケットが持つ基本的な特徴を限りなく組み込むこともその開発の目的としました。

多くの患者さんは治療中の審美性を望む傾向にあります。しかし、セラミック製の矯正装置や舌側からの治療にかかる新たな費用負担を望んでいない場合もあります。マイクロ スプリント ブラケットはその際の魅力的な選択肢となります。とても小さなメタルブラケットは、患者さんの審美的要求に応えることが可能であるだけでなく、ニッケルフリー**の素材は、患者さんに治療中の安心感も提供できます。また、マイクロ スプリント ブラケット本体はラウンド処理され、特別な表面処理によって粘膜への干渉を和らげます。スロット入り口もラウンド処理(図2)が施されていますので、フリクションの減少を可能にします。マイクロ スプリント ブラケットは高密度の一体型で製造されていますので、プラークやバクテリアの付着に関してても有効な働きを示します。

マイクロ スプリント ブラケットは、市場でも非常に小さなブラケットの一つです。しかしマイクロ スプリント ブラケットは、フルサイズのブラケットが持つ基本的な特徴を持ち合わせています。マイクロ スプリント ブラケットは、金属射出成形(MIM)によって単一のステンレス鋼から製造され、一般的な矯正歯科治療に使用されるワイヤー サイズを問題なく結紮することができます。ブラケットのスロットベースはフラットにデザインされていますので、効果的なローテーション コントロールを提供します。結紮は従来のリゲチャー ワイヤー、及びエラスチック リゲチャーを使用でき、またエラスチックチェーンもリゲチャーワイヤーと併用することで従来通り使用することが可能です。

マイクロ スプリント ブラケットはとても小さなメタルブラケットですが、その取扱いはとても容易です。ブラケットの遠心歯肉側ウィングには色分けされたマーキングと部位の刻印によってブラケット部位を容易に識別します。ブラケット本体のひし形デザインと、ブラケット ベースにあるスクラブラインはブラケット プレースメント時に大きな利点となります。解剖学的な曲線(コントアーベース)を持ったブラケット・ベースは、歯牙との適切な適合を可能にし、特許となっているFORESTADENTホック・スタイル・ベース(図3)は、小さなブラケットにもかかわらず、良好なリテンションを提供します。FORESTADENT社ディボンディングプライヤー(501-0840)(図4)を利用すると、アーチワイヤーを付けたまま撤去が可能で、ブラケットベースの近遠心には斜面(図3)があり、これにより撤去時にブラケットを確実に保持することができます。

Micro Sprint® Brackets McLaughlin/Bennett/Trevisi System

Micro Sprint® Brackets Roth System



マイクロ スプリント ブラケットは、ロス システム*、M/B/T システム*の二つのテクニックが用意され、.018、.022 スロット、そして側切歯、犬歯、小臼歯にフックを選択することができます。

また、5-5(20ブラケット)のセットは1症例、5症例、10症例のセットを用意しています。

* The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

** ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォスタデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX.03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは...

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>