


クリアボウ

クリアリテーナーワイヤー

クリアボウ使用の装置例

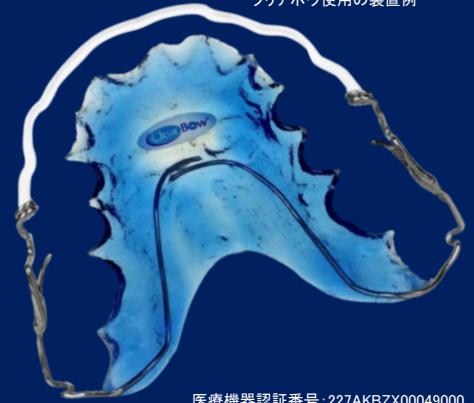

- ✓ 目立ちにくい半透明スリムワイヤーを使用
- ✓ 多くの症例に対応できる豊富なサイズ
- ✓ 壊れにくい耐久性のあるPET樹脂使用
- ✓ 長期間にわたり美しさを保ちます
- ✓ シンプルな技工作業を実現

Now on Sale !!

医療機器認証番号: 227AKBZX00049000
販売名: クリアボウ
一般的名称: 歯列矯正用歯牙維持装置
管理医療機器




保定も審美!!

クリアボウはシンプルな4ステップの技工作業!!

クリアボウは技工作業が必要となります。作業前には必ず添付文書、および製品に同封の使用説明書をお読みください。

① 専用ルーラを使用して適正サイズを選択

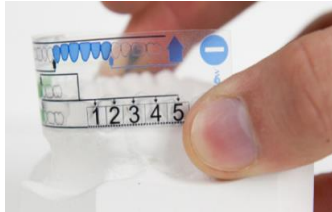

② ループ部の調整



③ ろう着作業




④ クリアボウを熱成型する

熱する (HEAT) →

締め込む (SQUEEZE) →

ヒートガンを離す (REMOVE HEAT) →

冷却 (COOLING)

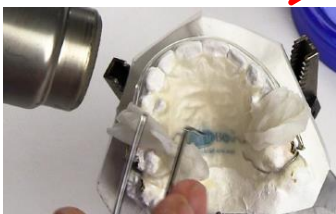

FAXご注文書

FAX
送信方向



ClearBow

FAX 03-3568-8864

フォレストudent・ジャパン株式会社 行き

クリアボウ クリア リテーナー ワイヤー

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名

〒

電話 ()

FAX ()


Mail @

1PK(5本入り) 標準価格 ¥20,000

抜歯症例用

クリアワイヤー

アーチ長

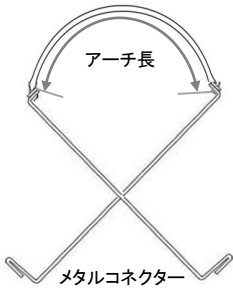

メタルコネクター


注文番号	製品名	クリアワイヤー アーチ長 (mm)	(適応範囲) 左右犬歯 遠心間距離	入数	注文数
CBS-10005	ClearBow Extraction Case -5	62 mm	56 - 61 mm	5	
CBS-10004	ClearBow Extraction Case -4	58 mm	52 - 56 mm	5	
CBS-10003	ClearBow Extraction Case -3	54 mm	48 - 52 mm	5	
CBS-10002	ClearBow Extraction Case -2	50 mm	44 - 48 mm	5	
CBS-10001	ClearBow Extraction Case -1	45 mm	41 - 44 mm	5	
CBS-1000A	ClearBow Extraction Case -A	42 mm	38.5 - 41 mm	5	
CBS-1000B	ClearBow Extraction Case -B	39 mm	36 - 38.5 mm	5	
CBS-1000C	ClearBow Extraction Case -C	37 mm	34 - 36 mm	5	

非抜歯症例用

クリアワイヤー

アーチ長


エクステンション
(非抜歯症例用)

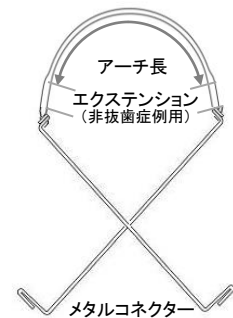

メタルコネクター

注文番号	製品名	クリアワイヤー アーチ長 (mm)	(適応範囲) 左右第1小臼歯 遠心間距離	入数	注文数
CBS-10015	ClearBow Non-Extraction Case +5	62 mm	71.5 - 76.5 mm	5	
CBS-10014	ClearBow Non-Extraction Case +4	58 mm	66.5 - 71.5 mm	5	
CBS-10013	ClearBow Non-Extraction Case +3	54 mm	61.5 - 66.5 mm	5	
CBS-10012	ClearBow Non-Extraction Case +2	50 mm	57.5 - 61.5 mm	5	
CBS-10011	ClearBow Non-Extraction Case +1	45 mm	54.5 - 57.5 mm	5	
CBS-1001A	ClearBow Non-Extraction Case +A	42 mm	51.5 - 54.5 mm	5	
CBS-1001B	ClearBow Non-Extraction Case +B	39 mm	49.5 - 51.5 mm	5	
CBS-1001C	ClearBow Non-Extraction Case +C	37 mm	47.5 - 49.5 mm	5	

クリアボウ専用ルーラ - 専用ルーラは製品に付属しています。 サイズの選定方法は必ず製品マニュアルをご確認ください。

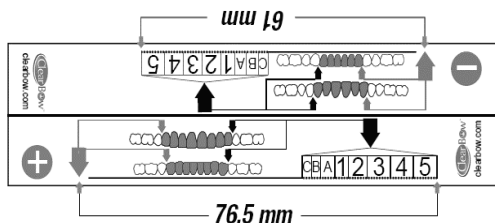

抜歯症例用の計測

青の矢印を左側犬歯の遠心側に合わせ、右側犬歯の遠心と一致する上にある番号がサイズとなります。

非抜歯症例用の計測

矢印を左側第1小臼歯の遠心側に合わせ、右側第1小臼歯の遠心と一致する上にある番号がサイズとなります。



クリアボウ製品マニュアル

図のルーラは原寸ではありませんのでサイズ測定にはご使用できません。

製造販売元:

フォレストudent・ジャパン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F

TEL: 03-6277-6980 FAX: 03-3568-8864
info@forestadent.co.jp http://www.forestadent.co.jp

PWG ORTHODONTIC
SPECIALTIES LTD.