

歯列矯正用ロック

リンガルロック

Lingual-Lock

リンガルアタッチメントの定番製品

医療機器認証番号:302AKBZX00085000
販売名: リンガルロック
一般的名称: 歯列矯正用ロック
管理医療機器



- ☑ 効率的なケアタイムを実現するロックタイプのリンガルアタッチメント
- ☑ 応用範囲の広いエクステンションタイプもご用意。
- ☑ MIM 製法による高品質リンガルシースを採用

リンガルロック
&
エクステンションタイプ

Produced by ASO International



■ リンガルロック

■ エクステンション

リンガルロック ロウ着方法

リンガルロックを確実にバンドにロウ着するために、以下の手順を推奨いたします。



可能な場合はロウ着前に仮着機で2~3か所止める
(フラックスは仮着後に塗布してください)



必ずロウをウイングの上まで返し、
ウイングに被せる様にロウ着してください。


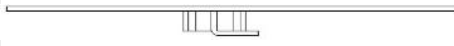


ご注文FAX 03-3568-8864

ご注文日: 年 月 日

リンガルロックご注文書

お名前 / 医院名			
〒	-		
電話	()	FAX	()
e-mail	@		

製品番号	製品名	サイズ	入数	ご注文数
<input type="checkbox"/> LL-001-010	リンガルロック 標準価格 ¥13,500	 (全長60mm 高さ3.6mm)	5 set (10本入り)	
<input type="checkbox"/> LL-002-010	リンガルロック エクステンション 標準価格 ¥3,160	 (全長104.7mm 高さ3.6mm)	1 set (2本入り)	

配達日、お届け先の変更のご希望がある場合はお書きください

尚、取寄せ品、品切れの場合はお届けまでに約3週間かかりますので、ご容赦ください。

その他ご希望、ご質問があればお書きください

ご注文

FAX 03-3568-8864

お問い合わせ

TEL 03-6277-6980

製造販売元:

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F