

U-BondTM Ortho

Light-cured Orthodontic Adhesive

U-ボンド オーソ 矯正用光重合型接着材



使用説明書

製品概要

U-ボンドオーソは光重合型の歯科矯正用接着材です。セラミック製ブラケット、またはメタル製ブラケットを歯面に接着します。

組成

- Bis-GMA
- ウレタンジメタクリレート
- 光重合触媒
- その他

適用

セラミック製ブラケット、またはメタル製ブラケットのダイレクトボンディング用接着材。

禁忌

U-ボンドオーソ光重合型接着材は、本材過敏症を有す患者、またはメタクリル酸モノマーに対する過敏症の既往がある患者には使用しないでください。

使用手順

1. 歯面をフッ素や油を含まない歯面研磨剤等で清掃し、水で洗い流します。
2. 歯面をしっかりと乾燥させます。
3. 歯の表面を15秒間エッチングします。
4. エッチング後、歯の表面を水で完全に洗浄し、エアーでしっかりと乾燥させます。
5. VERICOMのU-ボンド プライマーをよく振り交ぜ、2~3滴分取りだし、エッチングされた歯面に薄く均一に塗布します。
6. U-ボンド オーソをブラケットベースに塗布します。
7. 適切な力でブラケットを歯の表面に圧着します。ブラケットベースの周りから余分な接着材を取り除きます。
8. 照射口をできる限りブラケット表面に近づけ、適切は光重合照射器(420~500nm/≥800mW/cm²)を利用して真上から10秒間* 照射し光硬化させます。

*- 光重合ユニットの出力が800mW/cm²未満の場合、重合時間の延長が必要になる場合があります。照射時間に関してはご使用の光重合照射器の使用説明書に従ってください。


保管方法

1. 温度が上昇するところ並びに直射日光や強い光が当たるところには置かないこと。
2. 本材は2°C~27°Cで保管すること。
3. ユージノールを含む製品の近くで保存しないこと。
4. 使用後は、すぐにキャップをしっかりと閉めること。

使用上の注意

1. 本材に含まれるアクリレート類によりアレルギー反応が生じた場合、使用を中止し直ちに患者に医師の診断を受けるように指示すること。
2. 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往のある患者には使用しないこと。
3. 粘膜、肌に触れてしまった場合は、触れた場所を石鹸と水で洗うこと。もし刺激が続く場合には、医師の診断を受けること。
4. 万一目に入った場合には、直ぐに大量の流水でよく洗浄すること。もし刺激が続く場合には、医師の診断を受けること。
5. 本材を使用する際には、手袋を着用すること。
6. 使用の都度キャップを閉めて、光への暴露を避けること。
7. ポーセレンクラウン等への接着はディボンディングの際、クラウンが欠けたり剥離、破損の原因となり注意が必要となる。損傷があったり、表面加工の薄いポーセレン クラウン等への使用は避けること。
8. 歯科の従事者以外が触れないよう術者の責任のもとに適切に保管・管理すること。
9. ユージノールを含む製品の近くで保存しないこと。
10. 有効期間: 包装に記載。

Symbol

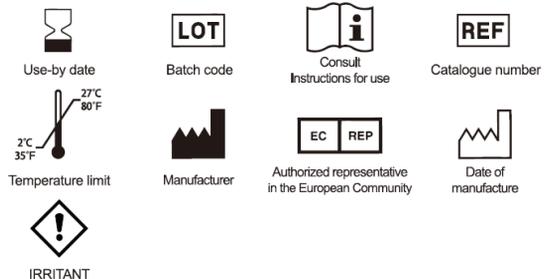

VERICOM CO., LTD.

Dental Materials

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea
vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com
www.vericom.co.kr

© VERICOM 2019. All rights reserved.

製造販売元:

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2階
TEL:03-6277-6980 FAX:03-3568-8864