

U-Bond™ Primer

Light-cured Adhesive Primer

U-ボンド プライマー 光重合型プライマー



使用説明書

製品概要

U-ボンド プライマーは、歯科矯正用接着材と歯科用ブラケットまたはバンドの接着強度を向上させる材料です。

組成

- Bis-GMA
- ウレタンジメタクリレート
- 光重合触媒
- その他

適用

セラミック製ブラケット、またはメタル製ブラケットのダイレクトボンディング用接着材。

禁忌

U-ボンド プライマーは、本材に過敏症を有す患者、またはメタクリル酸モノマーに対する過敏症の既往がある患者には使用しないでください。

使用手順

1. 歯面をフッ素や油を含まない歯面研磨剤等で清掃し、水で洗い流します。
2. 歯面をしっかりと乾燥させます。
3. 歯の表面を15秒間エッチングします。
4. エッチング後、歯の表面を水で完全に洗浄し、エアーでしっかりと乾燥させます。
5. エッチングされた歯面にブラシ等を使用して本材を薄く均一に塗布し、弱いエアーで乾燥させます。
6. その後は使用する光重合型接着材(U-ボンド オーソ)の使用説明書、又は添付文書に従いブラケットを歯面に接着してください。

保管方法

1. 温度が上昇するところ並びに直射日光や強い光が当たるところには置かないこと。
2. 本材は2°C~27°Cで保管すること。
3. ユージノールを含む製品の近くで保存しないこと。
4. 使用後は、すぐにキャップをしっかりと閉めること。

使用上の注意

1. 本材に含まれるアクリレート類によりアレルギー反応が生じた場合、使用を中止し直ちに患者に医師の診断を受けるように指示すること。
2. 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往のある患者には使用しないこと。
3. 粘膜、肌に触れてしまった場合は、触れた場所を石鹼と水で洗うこと。もし刺激が続く場合には、医師の診断を受けること。
4. 万一目に入った場合には、直ぐに大量の流水でよく洗浄すること。もし刺激が続く場合には、医師の診断を受けること。
5. 本材を使用する際には、手袋を着用すること。
6. 使用の都度キャップを閉めて、光への暴露を避けること。
7. 歯科の従事者以外が触れないよう術者の責任のもとに適切に保管・管理すること。
8. ユージノールを含む製品の近くで保存しないこと。
9. 有効期間: 包装に記載。

Symbol



Use-by date



Batch code



Consult
Instructions for use



Catalogue number



Temperature limit



Manufacturer



Authorized representative
in the European Community



Date of manufacture



IRRITANT

VERICOM CO., LTD.

Dental Materials

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea
vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com
www.vericom.co.kr

© VERICOM 2019. All rights reserved.

製造販売元:

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2階
TEL:03-6277-6980 FAX:03-3568-8864