

V-Etch™

V-エッチ
35%リン酸エッチング材



製品概要

V-エッチ(35%リン酸)は、天然保湿剤を配合することで先端の詰まりを最小限に抑える粘性溶液タイプです。V-Etchは、エナメル質に迅速なエッチング効果を示し、水洗で除去できます。

組成

- リン酸
- 精製水
- 増粘剤
- 保湿剤

適用

接着のために歯のエナメル質をエッチングする。

禁忌

口腔粘膜、目、歯髄組織などの軟組織には塗布しないでください。

保管方法

1. 2 - 27°Cで、キャップを閉めて保管します。
2. 温度が上昇するところ、直射日光や強い光が当たるところには保管しないでください。

使用上の注意

1. 歯科用のみに使用。
2. 歯科医および歯科従事者のみが使用できます。使用手順と注意事項を守ってください。
3. 子供や高齢者など、歯科従事者以外が触れないよう術者の責任のもとに保管・管理を行ってください。
4. 皮膚に付着した場合は、すぐに石鹼と水で洗ってください。
5. 使い捨て手袋と保護メガネの使用をお勧めします。
6. 誤って目に入ったり、口腔組織への接触が長引いた場合は、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
7. 誤って本材を飲み込んだ場合は、大量の水または牛乳を与え、嘔吐を誘発せず、制酸剤を服用し、医師の診察を受けてください。
8. 有効期限が切れた製品は使用しないでください。
9. 先端チップは再使用しないでください。


V-エッチ(1.2ml)の使用手順

1. 必要な場所をラバーダムで隔離し準備します。
2. キャップを取り外した後、先端チップを装備します。
3. エナメル質をV-エッチで15秒間脱灰します。十分に水洗を行い、エアでしっかりと水分を取り除きます。
4. エアブローでエッチング面を乾燥させます。エッチングされた表面が白濁しない場合は、エッチングを繰り返します。唾液の汚染には十分に注意が必要です。
5. 必要に応じて、手順3~4を繰り返します。


V-エッチ(30ml)バルクパックの詰め替え手順

1. 安全のために手袋と保護メガネを着用してください。
2. V-エッチ(30ml)バルクパックのキャップを取り外します。
3. 図1に示すように、空になったV-エッチ(1.2ml)のシリンジのルーアロックを時計回りにV-エッチ(30ml)バルクパックのシリンジの雄ネジに回転させてしっかりと接続します。
4. V-エッチ(1.2ml)のシリンジのプランジャーをゆっくり確実に引いて、空のシリンジにエッチング材を満たします。同時に、図2に示すように、バルクパックシリンジのプランジャーに軽く圧力をかけます。空のシリンジには過剰に充填しないよう注意してください。


【図1】

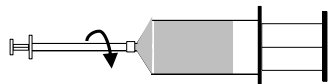

【図2】

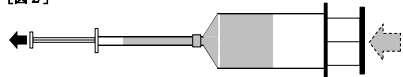

Symbol

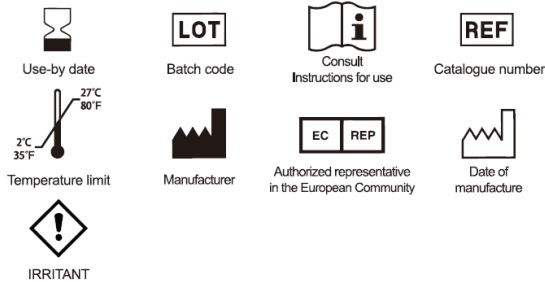

VERICOM CO., LTD.

Dental Materials
48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea
vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com
www.vericom.co.kr

© VERICOM 2019. All rights reserved.

製造販売元:

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2階
TEL:03-6277-6980 FAX:03-3568-8864