


ドイツ FORESTADENTから、安全で効果的な新しいエクspansion スクリューのご提案です。


スナップ-ロック エクスパンダーは1/4回転するとフラット スプリングによって次の回転までその位置でロックされ後戻りしません。

患者さんあるいはドクターはスクリューがロックするのを指先で感じることができるので、適切な回転量を知ることができます。


誤って過剰にスナップ-ロック エクスパンダーを回転させても、容易に回転を戻すことが可能です。

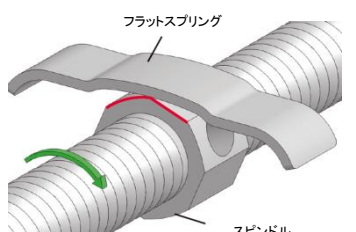

スクリュー回転時(アクティベーション)の状態

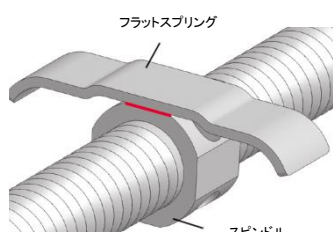




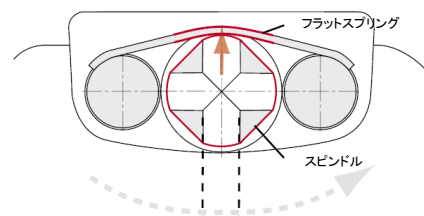

1/4回転した時点(アクティベーション終了時)の状態

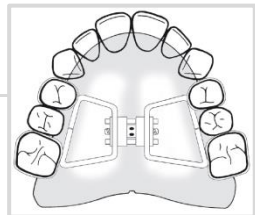

1/4回転ごとにフラット スプリングがスピンドルを押さええます(ロック)。

Exclusive from  
FORESTADENT




注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	 スナップ-ロック エクスパンダー
A167-1239		8mm  0.9	12mm	5	
A167-1239J				1	
A167-1439		10mm  0.9	14mm	5	
A167-1439J				1	
A167-1639		12mm  0.9	16mm	5	
A167-1639J				1	

標準価格 各¥28,000 / 5個入  
標準価格 各¥5,800 / 1個入


メモリー エクspansion スクリューは、本体に組み込まれた超弾性スプリングにより持続的で安定した矯正力を発揮します。

フォレストudentのメモリー エクspansion スクリューは、超弾性スプリングをスクリュー本体に組み入れています。そのため常に持続的で安定した矯正力を生み出し、临床上多くの利点と効果が期待できます。これはフォレストudentだけがご提供できるテクノロジーです。

使用法は今までの拡大スクリューと同じです。スクリューキーを差込、回転させて拡大を行います。超弾性スプリングが生み出す生体に適した持続的な力は患者さんにやさしい装着感を提供します。使用用途に合わせて7種類の製品をご用意しています。

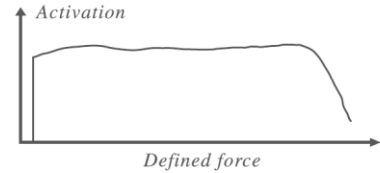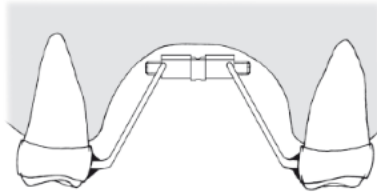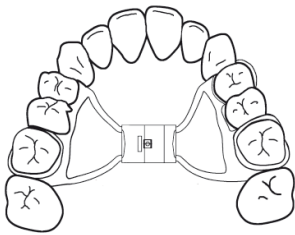


メモリーエクspansion スクリュー

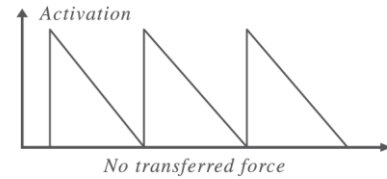



通常のエクspansion スクリュー

メモリー エクspansion スクリューの使用法は、今までのエクspansionスクリューと同じです。


1. スクリューを矢印の方向に回転させます。
2. スクリューの拡大の力はそのままダイレクトに歯牙には伝わらず、常に超弾性スプリングによる安定した持続的な力がかかります。
3. 超弾性スプリングの最大拡張幅は0.8mmですがスクリューは1回転で0.7mmのみの拡大となります。
4. よってスクリューを360° 回転しても、常にスクリューの代わりに、超弾性スプリングの安定した矯正力が働きます。
5. 口腔内へは、指で床を少し閉じて装着します。

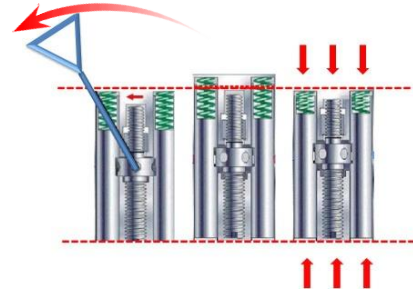

注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	
167M1529 167M1529J		10mm 0.8		5 1	<b>メモリー エクspander タイプ "N"</b> Force: 約 8N (800g)
A167M1326 A167M1326J		8mm 0.7		5 1	<b>メモリー アナトミカル エクspander タイプ "S"</b> Force: 約 5N (500g)

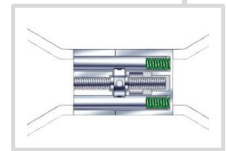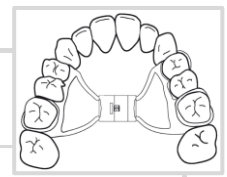

標準価格 ¥41,500 / 5個入  
標準価格 ¥8,600 / 1個入

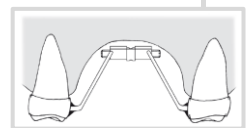


標準価格 ¥41,200 / 5個入  
標準価格 ¥8,500 / 1個入

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000  
販売名: フォレストアドントスクリュー

**アノミカル デザイン** (注文番号は青色で表示)

フォレストアドントのアノミカル エクスパンダーは、スクリュー本体に解剖学的デザインを取り入れたことに特徴があります。

この新しいデザインによって、アノミカル エクスパンダー本体は、より口蓋側にポジショニングされ、装着後の快適性が向上しました。

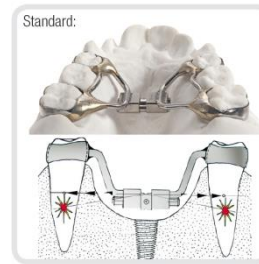


スタンダード デザイン



アノミカル デザイン

注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	
167-1633 167-1633J	 with Protection	12mm ↻ 0.9	15.5 mm	5 1	<b>パラタル スプリット スクリュー タイプ "N"</b>  標準価格 ¥21,800 / 5個入 標準価格 ¥4,500 / 1個入
A167-1633 A167-1633J	 with Protection	12mm ↻ 0.9	15.5 mm	5 1	<b>アノミカル エクスパンダー タイプ "N"</b>  標準価格 ¥21,800 / 5個入 標準価格 ¥4,500 / 1個入
167-1326 167-1326J		10mm ↻ 0.8	13 mm	5 1	<b>パラタル スプリット スクリュー タイプ "S"</b>  標準価格 ¥25,800 / 5個入 標準価格 ¥5,300 / 1個入
A167-1326 A167-1326J	 with Protection	10mm ↻ 0.8	14 mm	5 1	<b>アノミカル エクスパンダー タイプ "S"</b>  標準価格 ¥25,800 / 5個入 標準価格 ¥5,300 / 1個入

注文番号		入数	
501-0709		1	<b>パラタル スプリット スクリュー ベンディング プライヤー(タイプ "S" 用)</b> 最大屈曲許容径: 1.5 mm リテンション アームと本体の接合部にストレスを与え ることなくベンディングができます。  届出番号: 13B1X10233F00001 販売名: プライヤー 標準価格 ¥24,800



注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	
167-1323	 Acc. Dr. Elbel	10mm ↻ 0.8	13 mm	5	 パラタル スプリット スクリュー タイプ "S"  167-1323 標準価格 ¥25,800 / 5個入 169-1323 標準価格 ¥15,900 / 5個入
169-1323		10mm ↻ 0.8	13 mm	5	
168-1223		8mm ↻ 0.8	12 mm	5	下顎用 リンガル エクスパンダー  標準価格 ¥17,400 / 5個入
198-1223		8mm ↻ 0.8	12 mm	5	 下顎用 スリム リンガル エクスパンダー  標準価格 各 ¥31,800 / 5個入
198-1623		12mm ↻ 0.8	16 mm	5	

注文番号		入数	
100-0009		1	パラタル スプリット スクリュー キー  標準価格 ¥850 / 1個入

TR-0002		<h2 style="text-align: center;">Skeleton typeの 拡大装置による矯正歯科治療</h2> <p style="text-align: center;">—学童期の矯正歯科治療は“口呼吸”の改善から—</p> <p style="text-align: center;">保田好秀 保田好隆 著</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 発行 : 東京臨床出版</li> <li>■ 発売 : フォレストアデント・ジャパン株式会社</li> <li>■ A4変型判</li> <li>■ 98ページ フルカラー</li> <li>■ 定 価 : 7,000円 + 税</li> </ul>
---------	---	--