

Snap Lock Expander

フォレストアデント スナップ-ロック エクパンダー

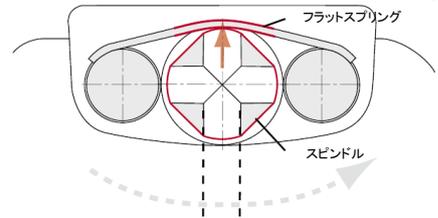
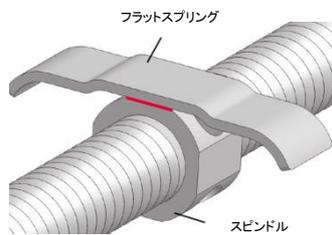
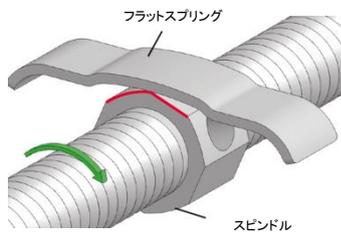
医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストアデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

ドイツ FORESTADENT から、安全で効果的な新しいエクspansion スクリューのご提案です。

スナップ-ロック エクパンダーは1/4回転するとフラットスプリングによって次の回転までその位置でロックされ戻りません。

患者さんあるいはドクターはスクリューがロックするのを指先で感じることができるので、適切な回転量を知ることができます。

誤って過剰にスナップ-ロック エクパンダーを回転させても、容易に回転を戻すことが可能です。

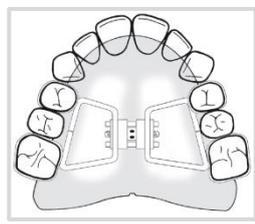


スクリュー回転時(アクティベーション)の状態

1/4回転した時点(アクティベーション終了時)の状態

1/4回転ごとにフラットスプリングがスピンドルを押さえ込みます(ロック)。

Exclusive from
FORESTADENT

注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	
A167-1239		8mm  0.9	12mm	5	 スナップ-ロック エクパンダー
A167-1239J				1	
A167-1439		10mm  0.9	14mm	5	
A167-1439J				1	
A167-1639		12mm  0.9	16mm	5	
A167-1639J				1	

Expansion Screws

Palatal split screws

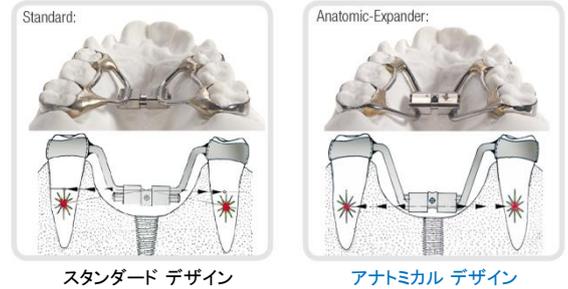
パラタル スプリット スクリュー

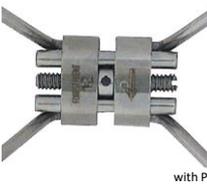
医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレスタデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

アナトミカル デザイン (注文番号は青色で表示)

フォレスタデントのアナトミカル エクスパンダーは、スクリュー本体に解剖学的デザインを取り入れたことに特徴があります。

この新しいデザインによって、アナトミカル エクスパンダー本体は、より口蓋側にポジショニングされ、装着後の快適性が向上しました。

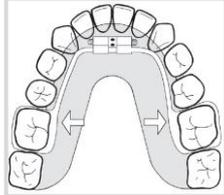


注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	
167-1633 167-1633J	 with Protection	12mm ↻ 0.9	15.5 mm	5 1	パラタル スプリット スクリュー タイプ "N"
A167-1633 A167-1633J	 with Protection	12mm ↻ 0.9	15.5 mm	5 1	アナトミカル エクスパンダー タイプ "N"
167-1326 167-1326J		10mm ↻ 0.8	13 mm	5 1	パラタル スプリット スクリュー タイプ "S"
A167-1326 A167-1326J		10mm ↻ 0.8	14 mm	5 1	アナトミカル エクスパンダー タイプ "S"

Palatal split screws

パラタル スプリット スクリュー

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストアデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数	
167-1323	 Acc. Dr. Elbel	10mm ↻ 0.8	13 mm	5	パラタル スプリット スクリュー タイプ "S"
169-1323		10mm ↻ 0.8	13 mm	5	
168-1223		8mm ↻ 0.8	12 mm	5	下顎用 リンガル エクスパンダー
198-1223		8mm ↻ 0.8	12 mm	5	 下顎用 スリム リンガル エクスパンダー
198-1623		12mm ↻ 0.8	16 mm	5	

パラタル スプリット スクリューのベンディング方法に関して

リテンションアームをベンドする際、溶接ジョイント部にストレスを与えないでください。
リテンションアームのベンドには2つのプライヤー、または3-ジョウ(Aderer)プライヤーを使用してください。
パラタル スプリット スクリュー タイプ Sのベンディングには、パラタル スプリット スクリュー
プライヤー(製品番号 501-0709)の使用を推奨します。



注文番号		入数	
501-0709		1	 パラタル スプリット スクリュー ベンディング プライヤー(タイプ "S" 用) 最大屈曲許容径: 1.5 mm リテンションアームと本体の接合部にストレスを与えることなく ベンディングができます。

届出番号: 13B1X10233F00001
販売名: フォレストアデント プライヤー
一般的名称: 歯科矯正用プライヤー
一般医療機器

Memory-Expansion screws

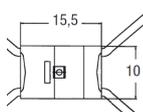
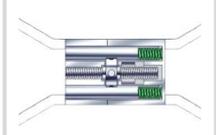
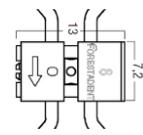
フォレストアデント メモリー エクスパンション スクリュー

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストアデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

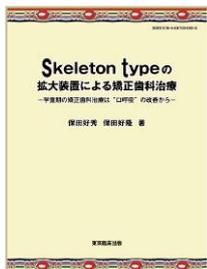
メモリー エクスパンション スクリューは、本体に組み込まれた超弾性スプリングにより持続的で安定した矯正力を発揮します。

メモリー エクスパンダー タイプ “N” & タイプ “S”

スケルトンタイプのエクスパンション スクリュー。本体内部に組み込まれたNiTi製コイルスプリングによって過大過ぎない一定の荷重を与えることが可能です。

注文番号	タイプ	拡大量	サイズ	入数		
167M1529 167M1529J		10mm  0.8		5 1	メモリー エクスパンダー タイプ “N” Force: 約 8N (800g)	 
A167M1326 A167M1326J	 with Protection	8mm  0.7		5 1	メモリー アナトミカル エクスパンダー タイプ “S” Force: 約 5N (500g)	

注文番号		入数	
100-0009		1	パラタール スプリット スクリュー キー



**Skeleton typeの
拡大装置による矯正歯科治療**

—学童期の矯正歯科治療は“口呼吸”の改善から—

著 者 保田好秀、保田好隆
体 裁 A4変型判、98ページ、フルカラー
定 価 7,000円＋税
発 売 フォレストアデント・ジャパン(株)

発行: 東京臨床出版株式会社