



メタルプリント スケルトンタイプ拡大装置 ＋ カスタマイズド バンド

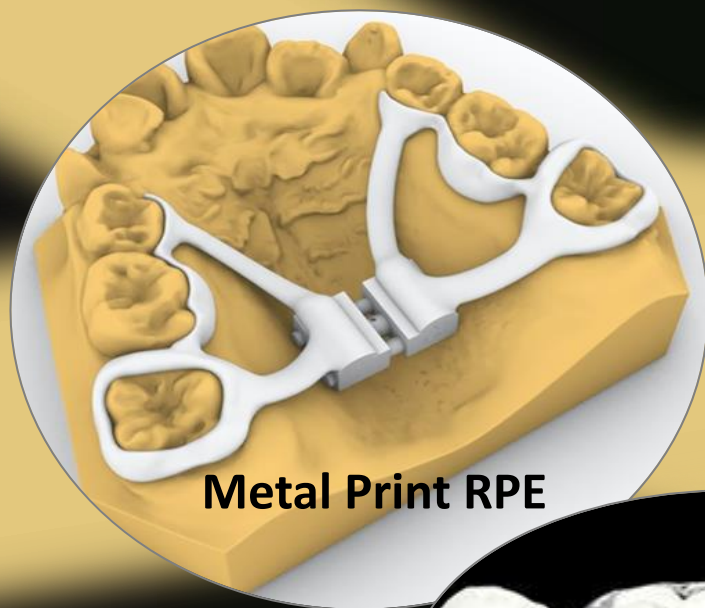

Metal Print RPE

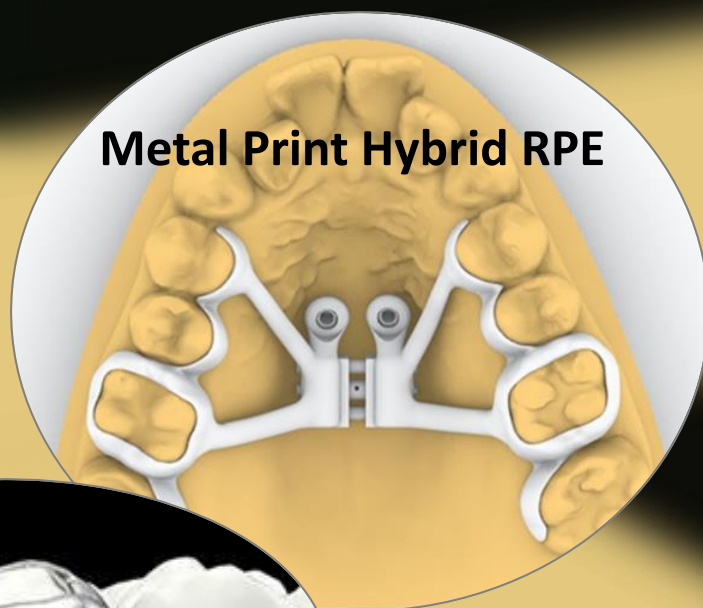

Metal Print Hybrid RPE



Customized Band

口呼吸を改善し、鼻呼吸を獲得することで様々な健康障害の改善が期待できます。その改善にはスケルトンタイプの拡大装置が有効です。メタルプリントを利用した一体型のスケルトンタイプの拡大装置とカスタマイズドバンドを利用することで、容易な装着、患者さんの不快感の軽減、等、大きなメリットが期待できます。

カスタマイズドバンドとは

個々の患者さんの歯牙データに合わせ、CADで設計しメタルプリンターで製作。様々な形状にカスタマイズしたバンドの製作が可能です。

導入メリット


- ✓ CADで正確にデザインしているので適合がよく、フレアアウトせず綺麗に拡大されます
- ✓ 装着が容易なのでチェアタイムも短縮
- ✓ セパレーターが不要、バンドの在庫が必要なし
- ✓ 来院回数も減らせる為患者さんにとってもラク
- ✓ IOSをお持ちの先生はスムーズにバンド系技工物の発注が可能

メタルプリント スケルトンタイプ 拡大装置は技工物となります。発注は技工指示書が必要となり、株式会社アソインターナショナル社への発注となります。


Snap Lock Expander

フォrestaデント スナップ-ロック エクスパンダー


後戻り防止機能と正確な回転を実現

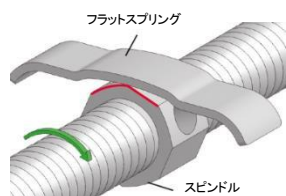

スクリュー回転時（アクティベーション）
の状態

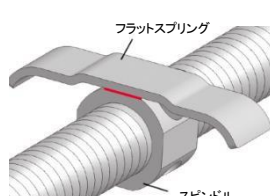

1/4回転した時点（アクティベーション終了）
の状態

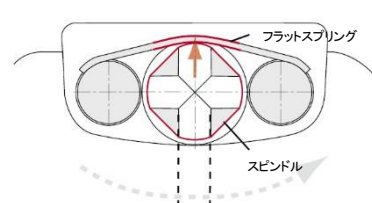

1/4回転ごとにフラットスプリングがスピンドルを
押さえ止めます（ロック）。

スナップ-ロック エクスパンダーは1/4回転するとフラットスプリングによって次の回転までその位置でロックされ後戻りしません。患者さん、ドクターはスクリューがロックするのを指先で感じることができるので、適切な回転量を知ることができます。誤って過剰にスナップ-ロック エクスパンダーを回転させても、容易に回転を戻すことが可能です。

医療機器認証番号：221AKBZX00039000
販売名：フォrestaデントスクリュー
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント管
理医療機器

ご購入可能なメタルプリント用フォrestaデント エクスパンションスクリュー

注文番号	エクспанション スクリュー タイプ	拡大量	サイズ	入数
167-1239		8 mm 0.9	12mm	5
167-1439		10 mm 0.9	14mm	5
167-1639		12 mm 0.9	16mm	5
169-1323		10 mm 0.8	13 mm	5
19801223		8 mm 0.8	12 mm	5

- メタルプリント スケルトンタイプ拡大装置、およびカスタマイズド バンドは技工物になりますので、株式会社アソインターナショナル社に直接ご注文ください。その際は技工指示書が必要となります。
- 上記掲載のフォrestaデント メタルプリント用エクспанションスクリュー単体でご購入の場合は、フォrestaデント・ジャパンでご注文いただけます。
- 技工物に上記以外のフォrestaデント スクリューをご希望の場合は、アソインターナショナル社へご相談ください。
- メタルプリント スケルトンタイプ スクリューの装着にはアイオノマー系セメントをご使用ください。

メタルプリント スケルトンタイプ拡大装置のご注文

<https://www.aso-inter.co.jp/>



ASO International, Inc.
Orthodontic Laboratory Services

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

<お問い合わせ・製造販売元> フォrestaデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご相談は……

TEL. 03-6277-6980 <http://www.forestadent.co.jp>