

Quicklear® III -Brackets

クイックリアー III

セラミック セルフライゲーション ブラケット

審美性と安定したメカニクスを可能にする
美しく強いセルフライゲーション ブラケット




Quicklear® III -Brackets



クイックリアー III セラミック セルフライゲーション ブラケット

クイックリアー III は審美性と安定したメカニクスを可能にする美しく強いセルフライゲーション ブラケットです。

第3世代のセラミック セルフライゲーション ブラケット“クイックリアー III”は、従来品と比較してロープロファイルとなり、さらにフックの形状、より丸みを加えたブラケット デザインによって、口腔内での快適性が向上しました。

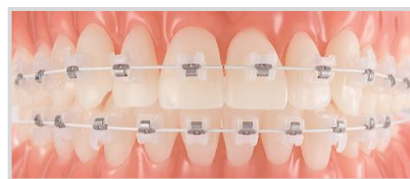


スロットはインターアクティブ タイプで、ワイヤーサイズが .018" x .018" 又は、.016" x .022" まではパッシブな状態となり、ワイヤーサイズが .018" x .025" (.018 スロット)、又は、.022" x .025" (.022 スロット) になると完全なアクティブな状態となり効果的なトルク コントロールが可能となります。



ブラケット本体内側にオフセットをつけて彫りこまれたクイックリアーIII セラミック ブラケットのベースは、その独自のデザインによって安定したリテンション(接着強度)を実現すると共に、専用のブラケット撤去用インスツルメントを利用してセラミック ブラケットを破壊することなく容易に撤去ができます。また近遠心に傾斜をつけたブラケット ベースのデザインは安全で安定したブラケット撤去を可能にします。



安定した機能(開け閉め)を発揮するクリップのデザインと厚みを変更しさらなる強度を持たせました。これにより比較的長期にわたる治療においても安定した開閉とワイヤーコントロールを実現します。さらにメタル表面をマット仕上げにすることで審美性を向上させました。

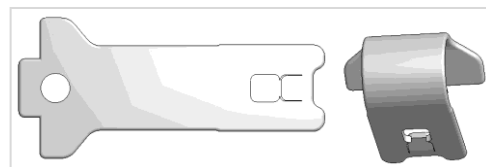


Quicklear® III -Brackets

クイッククリアー III セラミックセルフライゲーション ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00115000
販売名: フォレストアデント クイッククリアー ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

医療機器認証番号: 221AKBZX00114000
販売名: フォレストアデント クイック ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

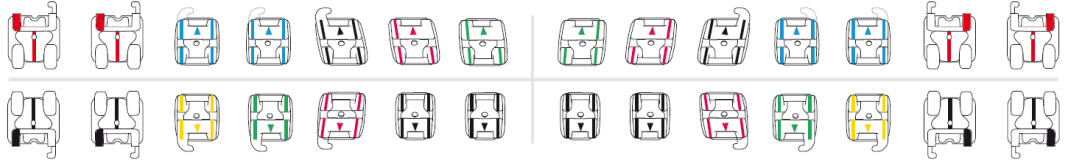

Roth System*

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	1.0	-	C731-0103	C730-0103	C731-0101	C730-0101
2 側切歯	+8	+9	1.3	-	C731-0203	C730-0203	C731-0201	C730-0201
3 犬歯 フック付	-2	+11	0.9	4° mesial	C731-0313	C730-0313	C731-0311	C730-0311
4+5 小臼歯	-7	0	0.9	2° distal	-	-	-	-
小臼歯 フック付	-7	0	0.9	2° distal	C731-0513	C730-0513	C731-0511	C730-0511
6 大臼歯 フック付	-14	0	-	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711
7 大臼歯 フック付	-14	0	-	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	0	0	1.4	-	C730-1203		C730-1201	
3 犬歯 フック付	-11	+7	1.2	2° mesial	C731-1413	C730-1413	C731-1411	C730-1411
4 小臼歯 フック付	-17	0	1.2	4° distal	C731-1513	C730-1513	C731-1511	C730-1511
5 小臼歯 フック付	-22	0	1.2	4° distal	C731-1613	C730-1613	C731-1611	C730-1611
6 大臼歯 フック付	-20	0	-	2° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711
7 大臼歯 フック付	-20	0	-	2° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

クイッククリアー III ブラケット 5-5 セット Roth* System

医療機器認証番号: 221AKBZX00120000
販売名: フォレストアデント クイック/クイッククリアー
ブラケット スターター キット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

** 下顎小臼歯はクイックメタルブラケットになります。

	クイッククリアー セラミック ブラケット	クイック メタル ブラケット	Slot .018		Slot .022	
			1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
上顎	1-2 + 3-5	-	C706C1080	C706C1081	C706C1084	C706C1085
下顎	1-2 + 3-5	-				
上顎	1-2 + 3-5		C706-1078**	C706-1079**	C706-1082**	C706-1083**
下顎	1-2 + 3	4-5 小臼歯フックなし				
上顎	1-2 + 3-5		C706-1080**	C706-1081**	C706-1084**	C706-1085**
下顎	1-2 + 3	4-5 小臼歯フック付				

* The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

Quicklear® III -Brackets

クイックリアー III セラミックセルフライゲーション ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00115000
販売名: フォレストアデント クイックリアー ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

医療機器認証番号: 221AKBZX00114000
販売名: フォレストアデント クイック ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	1.1	-	C733-0103	C732-0103	C733-0101	C732-0101
2 側切歯	+10	+8	1.3	-	C733-0203	C732-0203	C733-0201	C732-0201
3 犬歯 フック付	-7	+8	0.9	-	C733-0313	C732-0313	C733-0311	C732-0311
4 小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	C733-0413	C732-0413	C733-0411	C732-0411
5 小臼歯 フック付	-7	0	1.3	-	C733-0513	C732-0513	C733-0511	C732-0511
6 大臼歯 フック付	-14	0	-	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711
7 大臼歯 フック付	-14	0	-	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-6	0	1.4	-	C732-1203		C732-1201	
3 犬歯 フック付	-6	+3	1.2	-	C733-1413	C732-1413	C733-1411	C732-1411
4 小臼歯 フック付	-12	+2	1.2	-	C733-1513	C732-1513	C733-1511	C732-1511
5 小臼歯 フック付	-17	+2	1.2	-	C733-1613	C732-1613	C733-1611	C732-1611
6 大臼歯 フック付	-20	0	-	12° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711
7 大臼歯 フック付	-20	0	-	12° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

クイックリアー III ブラケット 5-5 セット

McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

医療機器認証番号: 221AKBZX00120000
販売名: フォレストアデント クイック/クイックリアー
ブラケット スターター キット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

** - 下顎小臼歯はクイックメタルブラケットになります。

	クイックリアー セラミック ブラケット	クイック メタル ブラケット	Slot .018		Slot .022	
			注文番号		注文番号	
			1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
上顎	1-2 + 3-5	-	C706C0847	C706C0848	C706C0862	C706C0863
下顎	1-2 + 3-5	-				
上顎	1-2 + 3-5		C706-0842**	C706-0843**	C706-0857**	C706-0858**
下顎	1-2 + 3	4-5 小臼歯フックなし				
上顎	1-2 + 3-5		C706-0847**	C706-0848**	C706-0862**	C706-0863**
下顎	1-2 + 3	4-5 小臼歯フック付				

* - The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

医療機器認証番号: 221AKBZX00115000
販売名: フォレストアデントクイックリアーブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストアデント パッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

Quicklear® III -Brackets

クイックリアー III セラミックセルフライゲーション ブラケット



FACE Evolution System

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	1.0	-	C739-0103	C738-0103	C739-0101	C738-0101
2 側切歯	+8	+9	1.3	-	C739-0203	C738-0203	C739-0201	C738-0201
3 犬歯 フック付	+3	+8	0.9	-	C739-0313	C738-0313	C739-0311	C738-0311
4+5 小臼歯	-7	0	0.9	-	C739-0503	C738-0503	C739-0501	C738-0501
小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	C739-0513	C738-0513	C739-0511	C738-0511
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	10° distal	739-0704	738-0704	739-0702	738-0702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	6° distal	739-0804	738-0804	739-0802	738-0802

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-1	0	1.4	-	C738-1303		C738-1301	
下顎前歯 Option	-6	0	1.4	-	C738-1203		C738-1201	
3 犬歯 フック付	-6	+2	1.2	-	C739-1413	C738-1413	C739-1411	C738-1411
4 小臼歯 フック付	-17	0	1.2	-	C739-1513	C738-1513	C739-1511	C738-1511
5 小臼歯 フック付	-22	0	1.2	-	C739-1613	C738-1613	C739-1611	C738-1611
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739B1704	738B1704	739B1702	738B1702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739-1804	738-1804	739-1802	738-1802

クイックリアー III ブラケット 5-5 セット FACE Evolution System

医療機器認証番号: 221AKBZX00120000
販売名: フォレストアデント クイック/クイックリアー
ブラケット スターター キット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

** 下顎小臼歯はクイックメタルブラケットになります。

	クイックリアー セラミック ブラケット	クイック メタル ブラケット	Slot .018		Slot .022	
			注文番号		注文番号	
			1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
上顎	1-2 + 3-5	-	C706C1206	C706C1207	C706C1215	C706C1216
下顎	1-2 + 3-5	-	C706-1203**	C706-1204**	C706-1212**	C706-1213**
上顎	1-2 + 3-5	4-5 小臼歯フックなし	C706-1206**	C706-1207**	C706-1215**	C706-1216**
下顎	1-2 + 3	4-5 小臼歯フック付				

Quick® molar-Brackets

6番/7番用 クイック モラー セルフライゲーション ブラケット
(ダイレクト ボンディング ベース)

クイック モラー(大臼歯)ブラケットは歯列矯正治療をより効率的に行うための選択肢を提供します。以前のようにアーチワイヤーを縫うように第1、第2大臼歯に通す不便さはもう過去のことです。さらに予め口腔外でシンチバックしたワイヤーをセットすることが可能となります。



医療機器認証番号: 221AKBZX00114000
販売名: フォレストアデントクイック ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

1 PK (10個入)

	Teeth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Active/Passive	注文番号	
							右	左
	76 67	-14	0	12	.018	インターアクティブタイプ	731-0713	730-0713
					.022		731-0711	730-0711
	76 67	-14	0	12	.018	フルパッシブタイプ	731P0713	730P0713
					.022		731P0711	730P0711
	76 67	-20	0	2	.018	インターアクティブタイプ	731-1713	730-1713
					.022		731-1711	730-1711
	76 67	-20	0	2	.018	フルパッシブタイプ	731P1713	730P1713
					.022		731P1711	730P1711

Comfort Line buccal tubes

フォレストアデント コンフォートライン バッカルチューブ



FACE Evolution System


医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストアデントバッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

1 PK (10個入)

	Teeth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Base	注文番号	
							右	左
	6 6	-30	0	10	.018	ダイレクト用 スタンダードベース	739-0704	738-0704
					.022		739-0702	738-0702
	7 7	-30	0	6	.018	ダイレクト用 スモールベース	739-0804	738-0804
					.022		739-0802	738-0802
	6 6	-30	0	0	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	739B1704	738B1704
					.022		739B1702	738B1702
	7 7	-30	0	0	.018	ダイレクト用 スモールベース	739-1804	738-1804
					.022		739-1802	738-1802

Tips for using the Quicklear bracket effectively

クイックリアー ブラケットを効果的に使用するために

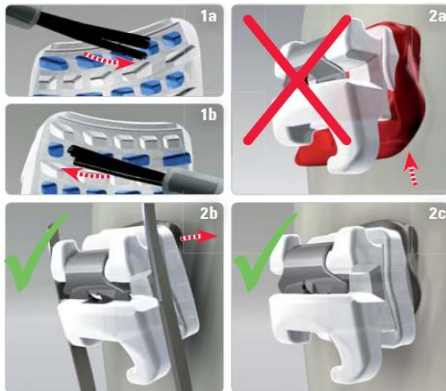

Bonding of Quicklear bracket

最適な機械的接着強度を得るために、クイックリアー ブラケット ベースは互い違いにオフセットをつけて彫り込まれています。プライマーをベースに塗布する場合* はブラケット ベースのオフセット方向にそれぞれブラッシングしてください(1a/1b)。

レジンにはブラケットベースに必要最小限の量を塗布し、ブラケットは歯肉側を先に歯面に接触させるように装着してください。これによって、余剰レジンのクリップへの流入を防ぐことができます(2a/2b/2c)。

*- ご使用する接着剤によって使用方法が異なります。
必ず使用説明書をお読みください。

How to open and close the clip

クリップを開くときは2つの方法があります。唇側からクリップホールに専用インスツルメントの先端を歯面に垂直に差し込み、歯軸に対して平行のまま咬合側方向に動かします(1a/1b)。

又は、歯肉側からインスツルメントをクリップの突起にあてて押し込み、クリップを開きます(2a)。



いずれの場合も必ず専用のインスツルメントを使用してください。

クリップを閉めるときは指を使って容易に閉めることができます(1c/2b)。



C501-1842 クイックリアー/クイック ディレクター

注意1: ブラケットを装着した直後にクリップを開くときは、唇側から行ってください。

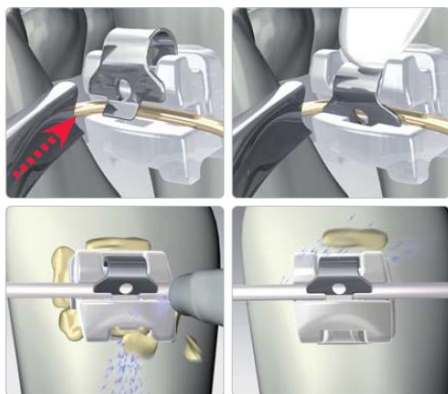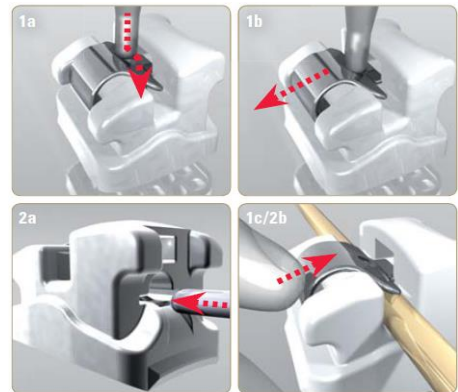

Wire replacement

クリップを閉じる前に、アーチワイヤー ディレクターを利用して、アーチワイヤーをブラケットスロットに深く押し込んでください。ワイヤー交換の前に、歯石などを除去するためエアブローなどを用いてブラケットの清掃を行うことを推奨します。




501-0861 アーチワイヤーディレクター

Bracket removal

ブラケットの破損を避けるため、ディボンディング ツール* は咬合面に平行にして、ブラケットの近遠心の中央にしっかりと挟み込みます。ツールを遠心側にそのままゆっくりと倒しブラケットを撤去します(1a/1b)。余剰の接着剤は通常、歯面に残り、カーバイトバーなどで取り除きます(2a)。



C501-0815 クイックリアー ブラケット
ディボンディング ツール DE (ダブルエンド)

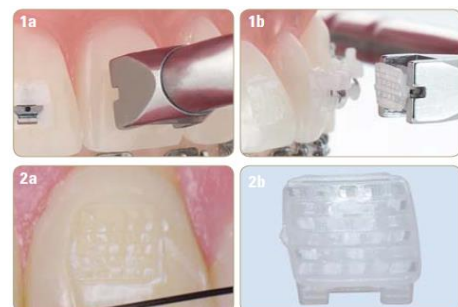

注意2: ブラケット撤去には必ずクイックリアー専用ディボンディング ツール* を使用してください。

Quicklear bracket accessories

クイックリアーブラケットアクセサリ



C501-1842		1	<p>届出番号:13B1X10233F00002 販売名:フォレストアデント ディレクター 一般的名称:歯科矯正用結さつ器 一般医療機器</p> <p>クイックリアー/クイックディレクター オートクレーブ滅菌対応</p>
501-0861		1	<p>届出番号:13B1X10233F00002 販売名:フォレストアデント ディレクター 一般的名称:歯科矯正用結さつ器 一般医療機器</p> <p>アーチワイヤー ディレクター オートクレーブ滅菌対応</p>
C501-0815		1	<p>届出番号:13B1X10233F00001 販売名:フォレストアデント プライヤー 一般的名称:歯科矯正用プライヤー 一般医療機器</p> <p>グラム セラミックブラケット / クイックリアー セルフライゲーション ブラケット 共用ディボンディング ツール DE (ダブルエンド) オートクレーブ滅菌対応</p>
C501-0828		1	<p>届出番号:13B1X10233F00001 販売名:フォレストアデント プライヤー 一般的名称:歯科矯正用プライヤー 一般医療機器</p> <p>ブラケットリムービング プライヤー ノッチ付 ワイヤーを装着したままブラケット撤去が可能です。</p>
C950-1009		1	<p>クイックリアー III コンサルテーション モデル</p>