

Bleach

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



ソフト/ラバー
(EVA)

Track® Bleach

フォレストアデント
トラック ブリーチ サーモフォーミング フォイル



包装に表示された日付までに使用してください。



< 25°C

密閉容器に入れ、外圧、直射日光及び湿気を避けて、25°C未満の室温で火気厳禁の場所に保管してください。



製品に同封の添付文書を必ずお読みください。



再使用禁止



材質：
エチレン/酢酸ビニル共重合体(EVA)

サイズ：
直径：125 mm 厚さ：1.00 mm

特徴：
高弾性と形態の安定性を持つ柔軟な材料です。

用途：
個人トレー、ベースプレート

保管： 開封後、未使用のフォイルがある場合は、湿気をさけるために密封して保管してください。

熱成型時間：
FORESTADENT社 歯科技工用吸引型成型器(トラックV)を使用した場合の推奨される温度と冷却時間です。(表1.)

加熱時間のコントロールが無い形成器を使用する場合、フォイルが過熱で多少下がったところで成型してください。

厚さ (mm)	温度 (°C)	時間 (分)
1.0 mm	175	90

表1. FORESTADENT社 トラックVによる加熱時間

参考：
SCHEU-DENTAL社 MINISTAR® / Biostar®による加熱時間。(表2.)
*- 使用前に必ず製品に添付された使用説明書を確認してください。

トラックブリーチ 厚さ (mm)	時間(秒)	コード
1.0mm	50 sec	162

表2. SCHEU-DENTAL社 MINISTAR® / Biostar®による加熱時間

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店
フォレストアデント ジャパン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F
FAX : 03-3568-8864 <http://www.forestadent.co.jp>

お問い合わせ

03-6277-6980
info@forestadent.co.jp