



ソフト
(PE)

Track® C

フォレストアデント
トラック C サーモフォーミング フォイル



包装に表示された日付までに使用してください。



< 25°C

密閉容器に入れ、外圧、直射日光及び湿気を避けて、25°C未満の室温で火気厳禁の場所に保管してください。



製品に同封の添付文書を必ずお読みください。



再使用禁止



材質:

ポリエチレン(PE)

サイズ:

直径: 125 mm 厚さ: 0.50 ~ 1.00 mm

特徴:

軟らかく(ソフト)、水に溶解しない材質のフォイルです。レジンや接着剤は着かないのでトランスファートレー等に利用します。

用途:

トランスファートレー

熱成型時間:

FORESTADENT社 歯科技工用吸引型成型器(トラック V)を使用した場合の推奨される温度と冷却時間です。(表1.)

厚さ
(mm)



温度
(°C)



時間 (分)



0.5 mm
0.6 mm
1.0 mm

175
175
165

0:30 min
0:30 min
1:30 min

表1. FORESTADENT社 トラック VIによる加熱時間

参考:

SCHEU-DENTAL社 MINISTAR® / Biostar®による加熱時間。(表2.)

*- 使用前に必ず製品に添付された使用説明書を確認してください。

トラック C厚さ (mm)

時間(秒)

コード

0.5 mm
0.6 mm
1.0 mm

30 sec
35 sec
55 sec

121
131
172

表2. SCHEU-DENTAL社 MINISTAR® / Biostar®による加熱時間